

beurer MG 100

RO



RO Aparat de tapotament
cu infraroșu
Instrucțiuni de utilizare

Pachet de livrare

- Aparat de tapotament cu infraroșu
- 2 elemente de masaj interschimbabile
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt folosite în instrucțiunile de utilizare:



AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră.



ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.



Indicație Indicație privind informațiile importante.



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.

1. Prezentare

Funcțiile aparatului

Prin intermediul acestui aparat de masaj electric cu infraroșu, puteți asigura eficient și fără a beneficia de ajutor un masaj benefic Shiatsu pentru dumneavoastră sau alte persoane. Masajele pot avea efect relaxant sau stimulant, fiind utilizate în mod eficient pentru contracturile musculare, dureri și oboseală. Aparatul este destinat numai uzului propriu, și nu uzului medical sau comercial.

2. Utilizare conform destinației

Acest aparat este conceput pentru masarea părților individuale ale corpului uman. Nu poate înlocui însă tratamentul medical. Nu utilizați aparatul pentru masaj dacă vă regăsiți în una dintre situațiile prezentate în următoarele indicații de avertizare. În cazul în care nu sunteți sigur dacă aparatul de masaj este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul.



AVERTIZARE

Nu utilizați aparatul de masaj

- pentru copii;
- pentru animale;
- în cazul unui prolaps al nucleului pulpos sau al modificărilor patologice ale vertebrelor;
- pentru masaje în zona cardiacă în cazul în care beneficiați de un stimulator cardiac și consultați-vă medicul înainte de utilizarea aparatului și în alte regiuni ale corpului;
- în zone de piele și de corp umflate, arse, iritate sau rănite;
- în timpul sarcinii;
- pe față (ochi), pe laringe sau alte zone foarte sensibile ale corpului;
- în timpul somnului;
- după consumarea de medicamente sau alcool (capacitate redusă de percepție!).

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu dețin experiență și/sau cunoștințe suficiente, cu excepția cazului în care sunt monitorizate de o persoană competentă responsabilă pentru siguranța lor sau când primesc indicații din partea acestora la utilizarea aparatului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.

Înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să vă consultați medicul

- dacă suferiți de o afecțiune gravă sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală;
- în cazul răcelii însoțite de febră, varicelor, trombozei, tromboflebitelor, icterului, diabetului, problemelor sistemului nervos (de exemplu sciatică) sau inflamațiilor acute.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

3. Indicații de siguranță

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni la înstrăinarea aparatului.



AVERTIZARE

Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare



AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest aparat de masaj se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai la tensiunea de rețea menționată pe aparat;
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile;
- niciodată în timpul unei furtuni cu trăsnete.

În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul de alimentare. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde. Nu dezamblați aparatul, indiferent de situație.

În situația în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia de către producător sau de un centru autorizat de relații cu clienții pentru a se evita rănirea.

Asigurați-vă că aparatul de masaj, ștecărul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai în spații interioare uscate;
- doar dacă aveți mâinile uscate;
- niciodată în cadă, sub duș sau lângă chiuvete pline cu apă;
- niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună;
- niciodată în aer liber.

Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.

Reparații



AVERTIZARE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparații efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

Pericol de incendiu



AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate duce în anumite condiții la incendii!

Din acest motiv, nu utilizați aparatul de masaj

- mai mult de 15 minute (pericol de supraîncălzire); lăsați aparatul să se răcească timp de minimum 15 minute înainte de următoarea utilizare;
- nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere;
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă, ...

Manipulare



ATENȚIE

Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Aveți grijă să nu se prindă fire de păr în aparat.
- Evitați contactul cu obiecte ascuțite sau tăioase.
- Nu îndoiți cablul.
- Protejați aparatul împotriva surselor de căldură prea apropiate, cum ar fi aragazuri, radiatoare sau lumină solară directă.

Eliminarea ca deșeu




ATENȚIE

Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei 2002/96/CE – DEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



4. Descrierea aparatului

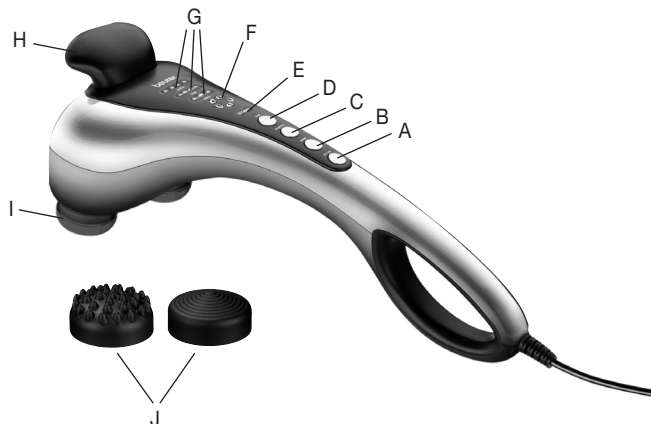

- A Tasta Pornire/Oprire
- B Speed
Reglarea vitezei de masaj
- C Programs
Alegerea unui program de masaj
- D Heat
Încălzire cu lumină infraroșie
- E Start
Program de pornire
- F Indicator pentru viteza de masaj
- G Programe de masaj
- H Mâner suplimentar
- I Suprafață de masaj cu căldură infraroșie
- J Accesorii de masaj interschimbabile

5. Punerea în funcțiune

- Îndepărtați ambalajul și folia de protecție a aparatului
- Verificați aparatul, ștecărul și cablul cu privire la deteriorări.
- Racordați aparatul la rețeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

6. Utilizare

Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a cupla cablul de alimentare. Porniți aparatul cu ajutorul tastei Pornire/Oprire. Se activează programul de pornire.

În caz de necesitate puteți mări/reduce cu o treaptă viteza de masaj apăsând tasta „Speed”.

Prin apăsarea tastei „Programs” puteți alege între 3 programe de masaj diferite (cu trepte de viteză automate).

- **Relax:** masaj relaxant sub formă de valuri.

- **Vital:** masaj înviorător și pulsant.

- **Active:** masaj pulsant cu efect în adâncime.

Funcția de încălzire cu lumină infraroșie poate fi activată în paralel cu toate programele de masaj apăsând tasta „Heat”.

Conduceți aparatul cu una sau cu ambele mâini în regiunea corpului care urmează a fi masată. Puteți sta în picioare, așezat sau culcat și vă puteți masa pe dumneavoastră sau puteți masa o altă persoană. Apăsând mai puternic sau mai puțin puternic aparatul de masaj puteți modifica intensitatea de masaj. Nu masați o anumită regiune a corpului mai mult de 3 minute; treceți după această perioadă la altă regiune a corpului.

După o utilizare de maximum 15 minute, decuplați aparatul și lăsați-l să se răcească. Depozitați aparatul într-un loc uscat.



Indicație

- Nu folosiți aparatul cu scurt timp înainte de a merge la culcare. Masajul poate avea efect stimulant și poate provoca tulburări ale somnului.
- Aparatul prezintă o funcție de oprire automată setată la o durată maximă de utilizare de 15 minute.



AVERTIZARE

- Masajul trebuie resimțit întotdeauna ca plăcut și relaxant. Întrerupeți masajul sau schimbați poziția aparatului de masaj dacă masajul vă provoacă dureri sau o senzație de disconfort.
- Nu introduceți și nu prindeți părți ale corpului, în special degete, în zona capului de masaj.

7. Întreținere și depozitare

Curățare

Ștergeți aparatul scos din priză și răcit cu o cârpă de microfibre ușor umezită. Puteți utiliza un detergent blând.



AVERTIZARE

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul doar conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Utilizați din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.

Depozitare

Păstrați aparatul de masaj într-un loc uscat și răcoros, care nu se află la îndemâna copiilor. Vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original.

8. Ce fac în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Capul de masaj nu se mișcă.	Aparatul nu este cuplat la rețeaua electrică.	Cuplați ștecărul și porniți aparatul.
	Aparatul nu este pornit.	Porniți aparatul.
	Protecția împotriva supraîncălzirii s-a declanșat.	Decuplați aparatul de la rețeaua de energie electrică, așteptați cel puțin 15 minute, cuplați-l din nou la rețeaua electrică și porniți-l.

9. Date tehnice

Dimensiuni (I/H/A)	~ 160/150/450 mm
Greutate	~ 1740 g
Putere nominală	20 W
Tensiune nominală	220-240 V ~ 50 Hz

