

## MG 80

### Aparat de masaj cu unde infraroșii

#### Stimate client,

Suntem foarte bucuroși că ați decis să achiziționați un produs din gama comercializată de compania noastră. Numele nostru este garanția asigurării unei calități înalte și a produselor integral testate din gama vizând încălzirea corpului uman, măsurarea greutateii corporale, a tensiunii arteriale, a temperaturii corpului, a pulsului, terapia ușoară, masaj și aerisire. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni pentru a folosi atent și să le păstrați pentru o folosire ulterioară; asigurați-vă că le puneți la dispoziția altor utilizatori și să respectați informațiile pe care le conțin.

Cu cele mai bune gânduri,  
Echipa Beurer

#### Observații Importante

- Conectați dispozitivul doar la o sursă de alimentare având tensiunea (voltajul) indicat pe plăcuța aparatului.
- Ca și în cazul oricărui dispozitiv electric, dispozitivul de masaj ar trebui utilizat cu grijă și atenție cu scopul evitării producerii de șocuri electrice:
- deconectați cablul de alimentare imediat după utilizare.
- preveniți orice contact cu apa (cu excepția cazurilor când îl curățați cu o cârpă ușor umezită). Apa nu trebuie să ajungă niciodată în interiorul aparatului. Nu scufundați niciodată aparatul în apă. Nu utilizați niciodată aparatul în baie, la duș, în piscină sau deasupra unui bazin plin cu apă. Dacă, în ciuda acestor măsuri de precauții, apa a reușit să pătrundă în interiorul carcasei aparatului, deconectați-l imediat și contactați-vă distribuitorul sau atelierul (service-ul) de reparații.
- Dispozitivul în general și cablul de alimentare în special ar trebui verificate înainte de utilizare pentru depistarea oricăror eventuale deteriorări.
- Nu cuplați dispozitivul la sursa de alimentare dacă cablul de alimentare este deteriorat. Contactați-vă distribuitorul sau atelierul de reparații.
- Reparațiile trebuie efectuate doar de către atelierul de reparații sau de către distribuitorii autorizați.
- Nu țineți suspendat și nu transportați niciodată dispozitivul ținându-l de cablul de alimentare al acestuia.
- Dacă apare vreo defecțiune pe parcursul utilizării, opriți-l imediat și scoateți-l din priză.
- Dispozitivul este destinat doar pentru scopurile descrise în acest manual de instrucțiuni. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate ca urmare a survenirii de eventuale vătămări corporale ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neateate a acestuia.
- Nu utilizați nici un fel de accesorii de masaj altele decât cele furnizate împreună cu dispozitivul.
- Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare individuală și nu pentru scopuri medicale (spitalicești) sau comerciale.
- Nu folosiți dispozitivul în mod continuu pentru o perioadă mai lungă de 20 de minute pentru a evita supraîncălzirea acestuia. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de reutilizarea acestuia. Suprafața dispozitivului se încălzește pe parcursul utilizării sale. Persoanele insensibile la căldură ar trebui să manifeste o atenție sporită la contactul cu această suprafață pentru a evita arsurile.
- Nu introduceți niciodată obiecte prin orificiile aparatului în interiorul acestuia. Asigurați-vă că părțile mobile ale aparatului se pot deplasa întotdeauna ușor și că nu există obiecte sau degete care să blocheze mișcarea acestora. Asigurați-vă ca nu ajung fire de păr în interiorul aparatului. Purtați o cască de cap dacă este cazul.
- Opriți dispozitivul și deconectați-l din priză atunci când atașați sau detașați mânerul sau oricare alte accesorii (părți detașabile) ale aparatului.
- Nu acoperiți niciodată aparatul atunci când acesta este în stare de funcționare (de exemplu cu păături, perne, etc.)
- Nu utilizați niciodată aparatul nesupravegheat, în special dacă se află în apropiere.
- Copiii, persoanele neajutorate sau cu dizabilități trebuie să utilizeze aparatul doar sub supravegherea unui adult sau trebuie să fie familiarizate foarte bine cu aparatul acesta înainte de utilizarea acestuia.
- Vă rugăm să nu utilizați aparatul pe animale domestice sau animale de companie.
- Persoanele cu aparat de reglare a ritmului cardiac (pacemaker) le este recomandat a-și consulta medicul înainte de utilizarea acestui dispozitiv de masaj și să nu îl utilizeze niciodată în zona inimii.

- Nu utilizați niciodată dispozitivul pe pielea inflamată, umflată, arsă sau pe zonele cu leziuni ale acesteia.
- Următoarele părți ale corpului nu ar trebui masate: oasele ( de ex. articulații, încheieturi, șira spinării), terminațiile altor zone sensibile ale corpului.
- Nu utilizați aparatul dacă suferiți de răceala cu febră, vene varicoase, tromboză, inflamații ale venelor, icter, forme de diabet, în cazul sarcinii, în caz de afecțiuni ale nervilor (de ex. sciatică) sau în cazul unor inflamații acute. În aceste cazuri vă rugăm să vă consultați medicul.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când stați în pat. Nu trebuie să adormiți niciodată pe parcursul utilizării acestuia.

#### 1. Descrierea dispozitivului

- A Mâner anti-alunecare
- B Comutator cu culisare: (OFF (OPRIT), M – Masaj, M+H – Masaj și radiație termică (căldură) pe infraroșii)
- C Controller masaj (ajustarea vitezei)
- D Suprafața de masaj cu infrarosu
- E Accesorii interschimbabile

#### 2. Utilizarea aparatului

Scopul utilizării: aparatul este utilizat doar pentru masajul corpului uman.

Asigurați-vă ca aparatul este oprit, înainte de a introduce stecherul în priză. Porniți aparatul, mutând butonul culisant pe M pentru masaj sau MH pentru masaj cu infrarosu.

Selectați viteza dorită.

Utilizați aparatul cu ambele mâini. Intensitatea masajului poate fi alternată cu intensitatea apăsărilor pe corp. Nu masati o anumită zonă mai mult de 3 minute.

După utilizarea aparatului pentru o perioadă de maximum 20 de minute, opriți-l din nou, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Depozitați aparatul într-un loc uscat.

#### 3. Curățare

Pentru a curăța dispozitivul scos deja din priză și după ce se acesta s-a răcit, ștergeți-l cu o cârpă ușor umezită. Puteți folosi pe post de agent de curățare un detergent moale. Totuși, asigurați-vă că apa nu ajunge niciodată în interiorul aparatului. Nu folosiți aparatul din nou până ce acesta nu este complet uscat.

#### 4. Reciclare

Vă rugăm să reciclați dispozitivul în concordanță cu prevederile directivei 2002/96/EG – WEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Deșeurile de echipamente electrice și electronice). Dacă aveți orice fel de întrebări și nelămuriri, vă rugăm să vă adresați autorităților locale responsabile cu reciclarea materialelor.

