


beurer CM 51



RO Masaj anticelulitic
Instrucțiuni de utilizare



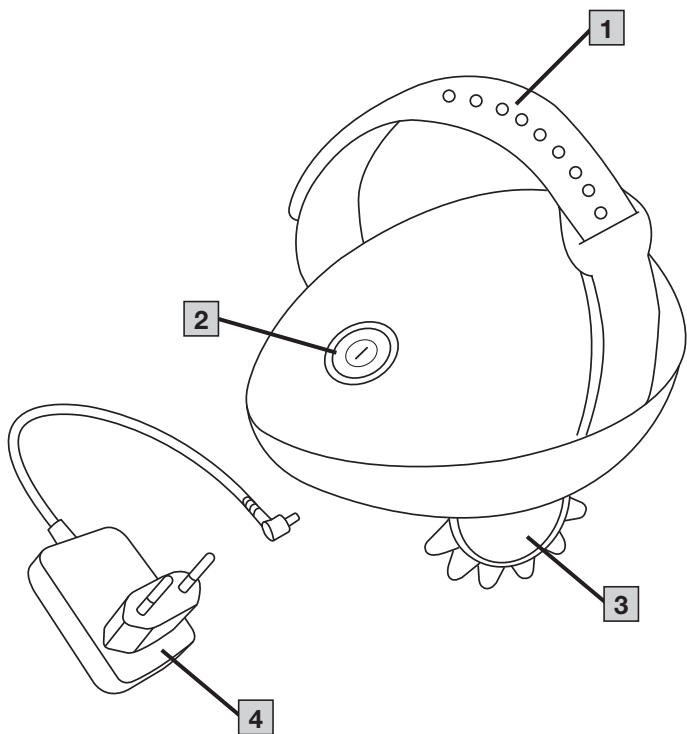



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Conținut

1. Pachet de livrare.....	3	7. Utilizarea.....	7
2. Explicația simbolurilor	3	8. Curățarea și întreținerea	7
3. Utilizare conform destinației	4	9. Accesorii și piese de schimb	8
4. Indicații de avertizare și de siguranță	5	10. Eliminarea ca deșeu	8
5. Descrierea aparatului.....	7	11. Date tehnice	8
6. Punerea în funcțiune.....	7	12. Garanție / service	8

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați aparatul pentru a vă asigura că starea ambalajului este ireproșabilă și conținutul este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau contactați-ne la adresa de service menționată.

- Masaj anticelulitic
- Cablu de alimentare
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:

AVERTIZARE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi decesul ori vătămări foarte grave.

ATENȚIE

Denumeste un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi vătămări ușoare ori minore.



Indicație

Indicație privind informațiile importante.



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție, încadrându-se prin urmare în clasa de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.



Separați componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.

	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Producător
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Citiți instrucțiunile
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasi
	Curent continuu
	Polaritate
	Alimentator de comutare
	Clasă de eficiență energetică 6
	Transformator de siguranță și izolare, protejat împotriva scurtcircuitelor
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	Temperatura ambiantă nominală Temperatura de funcționare maximă
	Protejat împotriva corpurilor străine solide cu diametrul de minim 12,5 mm
	"Nu folosiți adaptorul de rețea dacă ștecărul este deteriorat.
	Echipament clasa III
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Simbolul Importator

3. UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI

Acest aparat este conceput pentru masarea părților individuale ale corpului uman. Aparatul este destinat numai **uzului propriu**, nu este indicat în scop medical sau comercial. Masajul oferit de aparat nu poate înlocui însă tratamentul medical. Nu utilizați aparatul de masaj dacă una sau mai multe indicații de avertizare menționate în cele ce urmează sunt aplicabile în cazul dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți sigur/-ă dacă aparatul de masaj este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă consultați medicul.

⚠️ AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

⚠️ AVERTIZARE

Nu utilizați aparatul de masaj

- pentru animale,
- dacă zona corpului care urmează să fie masată prezintă modificări patologice sau este vătămată (de exemplu, prolapsul nucleului pulpos, rană deschisă),
- pentru masaje în zona cardiacă în cazul în care beneficiați de un stimulator cardiac și consultați-vă medicul înainte de utilizarea aparatului și în alte regiuni ale corpului,
- în zone de piele și de corp umflate, arse, iritate sau rănite,
- pe răni deschise, capilare, varice, acnee, cuperoză, herpes sau alte afecțiuni dermatologice,
- în timpul gravidității,
- pe față (ochi), pe laringe sau alte zone foarte sensibile ale corpului,
- nu utilizați aparatul pentru masajul picioarelor,
- în timpul somnului,
- după consumarea de medicamente sau alcool (capacitate redusă de percepție!),
- în autovehicul.

Înainte de a utiliza aparatul de masaj, vă recomandăm să vă consultați medicul, în special

- dacă suferiți de o afecțiune gravă sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul jumătății superioare a corpului,
- dacă beneficiați de un stimulator cardiac, implanturi sau alte elemente terapeutice auxiliare,
- dacă suferiți de tromboză,
- dacă suferiți de diabet,
- dacă aveți dureri a căror cauză este necunoscută.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și prezentați-le

și altor utilizatori. Înmânați acest manual o dată cu înstrăinarea aparatului.

Pericol de electrocutare

AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, și acest aparat de masaj se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, utilizați aparatul

- doar cu cablul de alimentare livrat și la tensiunea de rețea menționată pe acesta,
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor și defecțiunilor de funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu susțineți niciodată aparatul de cablu. Păstrați distanța între cabluri și suprafețele calde. Nu strângeți, îndoiți sau rotiți cablul. Nu îl perforați cu ace sau obiecte ascuțite.

Asigurați-vă că aparatul de masaj, comutatorul, elementul de rețea și cablul nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide. Prin urmare, utilizați aparatul doar în spații interioare uscate (de exemplu, nu îl utilizați niciodată în cadă, la saună).

Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul din priză. Nu utilizați aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile. Nu expuneți aparatul șocurilor și protejați-l împotriva căderii.

Reparații

AVERTIZARE

- Reparația aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Din cauza reparațiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați Serviciul Clienți sau un comerciant autorizat.

Pericol de incendiu

AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate cauza în anumite condiții apariția pericolului de incendiu!

Din acest motiv, nu utilizați aparatul de masaj

- niciodată acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă, ...
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.

Manipulare

ATENȚIE

Aparatul trebuie decuplat și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Trebuie să se evite introducerea obiectelor în orificiile aparatului sau între piesele mobile. Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- În timpul utilizării, aveți grijă ca părul să nu se poată prinde în accesoriile rotative. Pentru

- siguranță, purtați un elastic de păr.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- 1 Curea de mână reglabilă
- 2 Buton de PORNIRE/OPRIRE/Viteză
- 3 Role de masaj
- 4 Cablu de alimentare

6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, cablu de alimentare cu ștecăr și cablurile în vederea identificării defectărilor.
- Conectați fișa de legătură la mufa aparatului de masaj.
- Amplasați cablu într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

7. UTILIZAREA

Presăți aparatul de masaj cu atenție pe zona corpului pe care doriți să o masați.

În cazul în care vă provoacă dureri sau o senzație de disconfort, întrerupeți masajul sau schimbați poziția ori presiunea de strângere.

Nu prindeți sau strângeți părți ale corpului, mai ales degete, între rolele de masaj rotative.

Operare prin apăsarea tastei PORNIRE/OPRIRE/ Viteză **2** :

O dată: dispozitivul pornește, rolele de masaj încep să se rotească

De două ori: dispozitivul comută la treapta de viteză mai rapidă

De trei ori: dispozitivul se oprește, se încheie utilizarea.

Indicație

- Folosiți aparatul de masaj timp de maxim 15 de minute. Dacă durata masajului este mai lungă, se pot cauza stimularea excesivă a musculaturii și o stare de tensionare, nu de relaxare.

8. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățarea

AVERTIZARE

- Înainte de fiecare operațiune de curățare scoateți elementul de rețea din priză și din aparat.
- Curățați aparatul doar conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Rolele de masaj pot fi înlăturate trăgând cu putere de ele. Elementul cu role poate fi curățat sub jet de apă cu o perie moale și puțin detergent. Aparatul poate fi curățat cu o cârpă moale, puțin umezită.
- Utilizați din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.

Păstrare

Dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat, vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original

într-un mediu uscat și fără să fie exercitată presiune la nivelul acestuia.

9. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Pentru a achiziționa accesorii și piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, accesoriile și piesele de schimb sunt disponibile și în comerț.

Alimentator (UE) Nr. articol 110.167

Alimentator (UK) Nr. articol 110.166

10. ELIMINAREA CA DEȘEU

⚠ ATENȚIE

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



11. DATE TEHNICE

Alimentare de la rețea: Intrare leșire	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A 10,0 V === 1,2 A, 12 W
Eficiență operațională medie	≥ 83,59 %
Eficiență la sarcină redusă (10 %)	≥ 78,47 %
Consum de putere fără sarcină	≤ 0,072 W
Dimensiuni	aprox. 9,5 x 12,5 x 8 cm
Greutate	Dispozitiv principal: 172,5g Role de masaj: 51,0g Adaptor: 103,0g

12. GARANȚIE / SERVICE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

