







ANTELOPE
by beurer

**Antelope
Corefit II**



RO Centură de antrenament EMS
Instrucțiuni de utilizare

CE

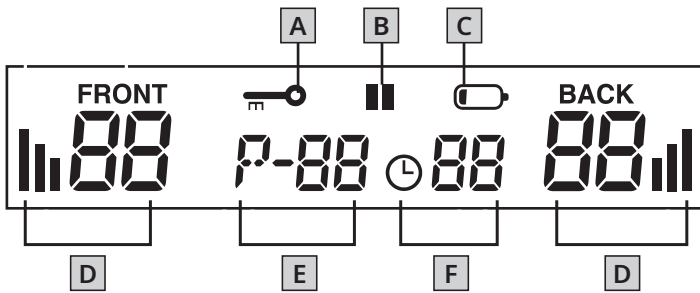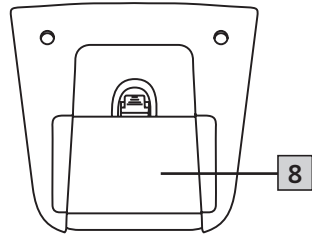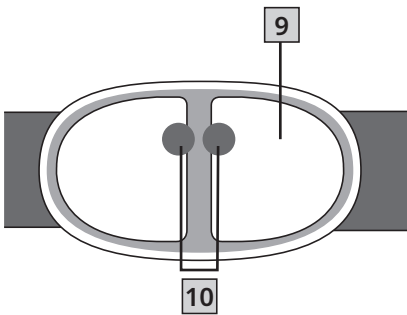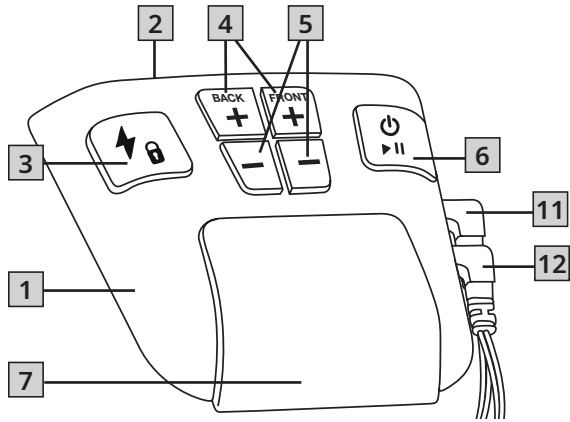



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și respectați indicațiile. Păstrați-le pentru utilizarea ulterioară și permiteți accesul la ele și altor utilizatori.

Bun venit în echipa Antelope!

Ne bucurăm foarte mult că ați ales antrenamentul EMS cu Antelope! Noi, cei de la beurer, combinăm experiența de peste 100 de ani de tradiție cu cunoștințele dobândite de-a lungul anilor în calitate de specialiști în produse EMS. Cu noul dumneavoastră produs Antelope vă așteaptă experiențe fantastice de antrenament.

Stimularea electrică a musculaturii este utilizată de mulți ani în domeniul sportului și al fitness-ului, precum și în domeniul reabilitării pentru antrenarea mușchilor. Chiar și antrenamentele scurte pot fi deosebit de eficiente, deoarece impulsurile electrice accentuează procesele naturale din organism. Vă puteți bucura de nouă programe EMS pentru antrenamentul de anduranță, fitness și HIIT, pentru dezvoltarea musculaturii și creșterea forței, precum și pentru regenerare.

În paginile următoare veți afla tot ce trebuie să știți despre produsul dumneavoastră Antelope. De asemenea, puteți arunca o privire online pe pagina noastră Antelope Corefit II Experience: <https://www.antelope-shop.com/en/retail/corefit2/>



Dacă mai aveți întrebări, serviciul nostru pentru clienți vă va consilia cu plăcere telefonic în germană și engleză. Programul de lucru al serviciului pentru clienți este disponibil la www.antelope-shop.com | +49 69 25786744

Vorbiți o altă limbă? Atunci scrieți un e-mail la:

✉ info@antelope.de

Veți să fiți mereu la curent și să sărbătoriți cu noi succesele dumneavoastră? Urmăriți-ne pe canalele noastre de socializare și abonați-vă la buletinul nostru informativ. Găsiți toate informațiile la www.antelope-shop.com.

Vă dorim distracție plăcută la antrenamentul EMS!

Pe curând,
Echipa Antelope



CUPRINS

1. Pachet de livrare	4	8. Programe.....	8
2. Explicația simbolurilor	4	9. Curățarea și întreținerea	10
3. Utilizarea conform destinației.....	4	10. Accesorii și piese de schimb	10
4. Indicații generale	5	11. Eliminarea ca deșeu.....	10
5. Descrierea aparatului	6	12. Date tehnice	10
6. Punerea în funcțiune	6	13. Garanție	11
7. Utilizare	7		

1. PACHET DE LIVRARE







Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul și componentele sale nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați dispozitivul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 x centură de antrenament EMS
- 1 x unitate de comandă Corefit II
- 3 x baterii AAA de 1,5 V

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Avertizare Indicație de avertizare privind pericolul de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră
	Dispozitivul poate emite valori de ieșire efective de peste 10 mA în medie, la intervale de 5 secunde
	Atenție Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/ accesoriilor
	Informații privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Producător
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivei europene și naționale în vigoare.
	Dispozitivul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere

	Nu eliminați la gunoierul menajer bateriile care conțin substanțe nocive
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Eliminați ambalajul ca deșeu în mod ecologic
	Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Număr de serie
	Număr de articol
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
	Marca de conformitate pentru Regatul Unit
	Simbol importator

3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

ATENȚIE

Utilizarea corespunzătoare

- Utilizați acest dispozitiv numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
- Dacă purtați bijuterii sau piercinguri (de exemplu, piercing în buric) în zona de utilizare, acestea trebuie îndepărtate anterior utilizării dispozitivului, deoarece, în caz contrar, se pot produce arsuri în locul respectiv.
- Nu utilizați acest dispozitiv concomitent cu alte dispozitive care transmit impulsuri electrice corpului dumneavoastră (de exemplu, aparate TENS).

- Dispozitivul este destinat numai pentru uz propriu și nu pentru utilizarea în scopuri medicale sau comerciale.
- Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a dispozitivului.
- În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați dispozitivul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.
- Utilizați dispozitivul numai împreună cu accesoriile incluse în pachetul de livrare.



În cazuri rare pot apărea iritații ale pielii în zona electrozilor.

Utilizarea necorespunzătoare

- Nu este permisă utilizarea dispozitivului:
 - în zona capului: aici poate cauza spasmodii.
 - în zona gâtului/arterei carotide: aici poate cauza un stop cardiac.
 - în zona faringelui și a laringelui: aici poate cauza spasme musculare, care pot conduce la asfixiere.
 - în apropierea toracelui: aici poate mări riscul de fibrilații și poate cauza un stop cardiac.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor, pentru a evita eventualele pericole.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta. Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul. Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu apropiați dispozitivul de surse de căldură.
- Nu utilizați dispozitivul în apropiere (la o distanță mai mică de 1 m) de aparatele cu unde scurte sau microunde (de exemplu, telefoane mobile), deoarece acestea pot influența modul de funcționare a acestuia.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie sau duș. Nu așezați sau depozitați dispozitivul în locuri de unde poate să cadă în chiuvetă sau în cadă.
- Nu introduceți niciodată dispozitivul în apă sau în alte lichide.


4. INDICAȚII GENERALE

DETERIORARE

- Verificați dispozitivul în mod frecvent cu privire la semne de uzură sau deteriorare. Dacă remarcați astfel de semne sau dacă dispozitivul a fost folosit necorespunzător, acesta trebuie prezentat producătorului sau comerciantului înainte de următoarea utilizare.
- Opriți dispozitivul imediat dacă acesta este defect sau dacă apar defecțiuni de funcționare.
- Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație exclusiv de către serviciul pentru clienți sau de către comercianți autorizați.
- În niciun caz nu încercați să reparați dispozitivul pe cont propriu.

ATENȚIE – PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ!

Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării la adulți sănătoși. Se interzice utilizarea dispozitivului în următoarele cazuri.

- Dispozitive electrice implantate (de exemplu, stimulator cardiac) 
- Dacă există implanturi metalice
- Aritmii
- Boli acute
- Epilepsie
- Cancer
- În zone cu răni sau tăieturi
- În timpul sarcinii
- În cazul predispoziției la hemoragii, de exemplu, după răni acute sau fracturi. Curentul stimulator poate provoca sau accentua hemoragiile.
- După operațiile la care o contracție musculară puternică ar putea afecta procesul de vindecare
- În cazul conectării simultane la un aparat chirurgical de înaltă frecvență
- În cazul hipotensiunii sau a hipertensiunii
- Febră mare
- Psihoze
- Pe zone umflate sau inflamate
- În cazul afecțiunilor acute sau cronice ale tractului gastrointestinal

În caz de dubii, consultați medicul.

⚠️ INDICAȚII PRIVIND MANIPULAREA BATERIILOR

- În cazul în care lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- **⚠️ Pericol de înghițire!** Copiii mici pot înghiți bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor mici!
- Respectați marcajele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
- Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- Protejați bateriile de căldura excesivă.
- **⚠️ Pericol de explozie!** Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
- În cazul în care dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeași valoare.
- Înlocuiți întotdeauna toate bateriile simultan.
- Nu utilizați acumulatori!
- Nu dezasablați, deschideți sau rupeți bateriile.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- 1 Unitate de comandă
- 2 Afișaj LCD
- 3 Tastă de programe și de blocare
- 4 Tasta Plus
- 5 Tasta Minus
- 6 Tasta Power (Pornit/Oprit/Pauză)
- 7 Suport
- 8 Capacul compartimentului pentru baterii
- 9 Electrozi
- 10 Element de acoperire pentru conexiunea electrozilor
- 11 Racord latură frontală/abdomen
- 12 Racord latură posterioară/spate

Afișaj

A	Cheie	funcția de blocare a tastelor este activată
B	Simbol de pauză	luminează intermitent când este activată pauza
C	Indicator stare baterie	luminează intermitent când bateria este consumată
D	Intensitate	nivelul setat al intensității 0 - 40
E	Program	programul selectat
F	Cronometru	timpul rămas din program în minute

6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Pașul 1: Introducerea bateriilor

- Înainte de prima punere în funcțiune a Corefit II, trebuie să introduceți bateriile în unitatea de comandă.
- Pentru aceasta, scoateți dispozitivul din suport, scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți bateriile conform marcajului în compartimentul pentru baterii.
- Trebuie să aveți în vedere polaritatea bateriilor.

i Dacă „simbolul baterie” luminează intermitent pe afișaj, bateriile sunt consumate și trebuie înlocuite.

Pașul 2: Punerea centurii

Asigurați-vă anterior fiecărui antrenament că pielea dumneavoastră este curată și nu prezintă urme de creme sau uleiuri. Numai în acest caz dispozitivul poate funcționa în mod optim. Așezați centura în fața dumneavoastră, electrozii fiind îndreptați spre dumneavoastră. Umeziți ambele perechi de electrozi și spatele dumneavoastră cu apă. Aveți grijă ca suprafețele electrozilor să fie umezite uniform pentru a evita tensiuni de vârf punctuale pe pielea dumneavoastră în timpul antrenamentului. Așezați centura în așa fel în jurul taliei dumneavoastră încât electrozii să se aple pe abdomenul și pe spatele dumneavoastră. Centura este fabricată din material elastic și este potrivită pentru diferite măsuri ale taliei. Aveți în vedere ca aceasta să fie suficient de strânsă pentru un contact bun între electrozi și piele, dar să nu vă strângă prea tare.

i Ajustați lungimea centurii cu ajutorul curelelor reglabile. Asigurați-vă că electrozii de pe abdomen și cei de pe spate sunt amplasați central.

i Intensitatea poate fi setată numai când electrozii se află în contact cu pielea. În cazul în care contactul cu pielea este întrerupt în timpul unui antrenament, nivelul de intensitate scade automat la zero.

Pasul 3: Pornirea și începerea programului

Apăsați tasta Power pentru a porni dispozitivul. Afișajul LCD se aprinde. La prima pornire a dispozitivului, se afișează automat primul program (P-01). Puteți schimba programul apăsând scurt tasta Power. În total există nouă programe. După ultimul program (P-09), dispozitivul trece la selectarea programului de la început.

Intensitatea poate fi reglată de la 0 la 40. La începutul antrenamentului simțiți mâncărimi ușoare. Odată cu creșterea intensității, simțiți contracțiile musculare direct sub electrozi, precum și în jurul acestora.

i La schimbarea programului sau la repornire, intensitatea crește automat la cea a ultimului antrenament.

7. UTILIZARE

Ce trebuie avut în vedere la antrenamentul cu Corefit II?

- Antrenați-vă de maximum trei ori pe săptămână.
- Luați pauze și lăsați-vă corpul să se regenereze timp de cel puțin 48 de ore.
- Nu vă antrenați mai mult de 20 până la 30 de minute pe sesiune, în funcție de solicitarea și intensitatea selectate.
- Ascultați-vă corpul și cunoașteți-vă limitele.
- Beți suficientă apă.
- Recomandăm utilizarea unui agent de contact pentru electrozi de la Antelope, mai ales dacă aveți pielea uscată.


Setarea nivelului de intensitate

Puteți seta intensitatea preferată la începutul fiecărui antrenament. Apăsați tasta Plus pentru a mări intensitatea și tasta Minus pentru a reduce intensitatea. În funcție de intensitate, veți simți mai întâi mâncărimi, iar apoi contracția musculară. Setăți intensitatea numai la un nivel pe care îl resimțiți plăcut. Intensitatea poate fi reglată separat pentru abdomen și spate.

Oprirea impulsurilor prea puternice

Puteți reduce oricând intensitatea apăsând tasta Minus sau puteți opri din nou dispozitivul apăsând tasta Power (~ 2 secunde). Dacă îndepărtați centura de pe abdomen/spate astfel încât contactul cu pielea să fie întrerupt în zona electrozilor, nivelul de intensitate revine automat la zero. La un nou contact cu pielea nu mai există nicio tensiune.

Evitarea modificării nedorite a impulsurilor

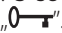
Pentru a evita ca, în timpul unui antrenament, intensitatea să crească accidental, activați pur și simplu funcția de blocare a tastelor. În acest scop, țineți apăsată tasta Power timp de aprox. 3 secunde, până când pe afișaj apare simbolul „”. Pentru a dezactiva funcția de blocare a tastelor, apăsați din nou tasta Power timp de aprox. 3 secunde, până când simbolul dispăre.

Reacția la senzații neplăcute

Dacă simțiți o înțepătură sau mâncărimi neplăcute pe piele, dar și când simțiți doar mâncărimi în locul contracțiilor musculare, opriți dispozitivul și procedați după cum urmează:

- Verificați dacă electrozii sunt în regulă sau dacă prezintă un defect.
- Verificați dacă elementul rotund de acoperire de deasupra conexiunilor electrozilor se află încă acolo.
- Înlăturați centura și umeziți-o încă o dată în întregime.
- Când o puneți din nou, aveți în vedere un contact bun cu pielea și o umezire corespunzătoare.

Luarea unei pauze în timpul antrenamentului

Dacă doriți să faceți o pauză în timpul unui program, apăsați scurt tasta Power. Simbolul de pauză „” apare pe afișaj. Puteți continua antrenamentul apăsând încă o dată tasta.

Utilizarea flexibilă a unității de comandă fără centură







Cu ajutorul setului de accesorii (neinclus în pachetul de livrare) aveți, în mod suplimentar, posibilitatea de racordare la unitatea de comandă a doi electrozi adezivi pentru opțiuni multiple de stimulare musculară. Puteți obține setul de




accesorii de la serviciul nostru pentru clienți sau din magazinul online beurer.

Oprirea automată

Dacă nu utilizați dispozitivul după pornire, acesta se oprește automat după 5 minute.

8. PROGRAME

#	Antrenament	Descriere	Frecvență*	Lungime impulsuri*	Ciclu de funcționare*	Durată (min.)
P-01	 Antrenament de forță de bază 4/4	Programul clasic de antrenament de forță EMS: pentru contracții musculare puternice și un efect de profunzime sporit. Acesta este adecvat pentru multe tipuri de antrenament și exerciții pentru creșterea țintită a forței. Cu acest program vă antrenați în intervalul de stimulare 4/4.	85 Hz	350 μs	4/4	20
P-02	 Antrenament de forță de bază 2/2	Programul clasic de antrenament de forță EMS: pentru contracții musculare puternice și un efect de profunzime sporit. Acesta este adecvat pentru multe tipuri de antrenament și exerciții pentru creșterea țintită a forței. Cu acest program vă antrenați în intervalul de stimulare 2/2.	85 Hz	350 μs	2/2	20
P-03	 Spate 2/2	Impulsurile mai lungi de 400 μs pătrund adânc în musculatură: acest program se adresează în special mușchilor mari și adânci. Programul este adecvat pentru multe tipuri de antrenament și antrenamente intensive pentru creșterea forței. Cu acest program vă antrenați în intervalul de stimulare 2/2.	85 Hz	400 μs	2/2	20
P-04	 Fitness	Excelent pentru mișcări dinamice, multe sporturi și sesiuni de anduranță. Programul nostru Fitness este cu adevărat multifuncțional. Acesta transmite în mod continuu impulsuri către mușchii dumneavoastră pentru un antrenament eficient de forță maximă și de anduranță. Pasionații de sport și fitness iubesc acest program datorită varietății sale mari.	40 Hz	350 μs	-	25
P-05	 Cardio	Căutați noi impulsuri pentru antrenamentul de anduranță și cardio? Atunci încercați programul nostru Cardio. Stimularea musculară continuă permite un grad ridicat de libertate la integrarea în antrenament. Durata mai mică a impulsurilor de 250 μs este, de asemenea, excelentă pentru sesiuni de antrenament mai lungi, de până la 30 de minute.	40 Hz	250 μs	-	30
P-06	 Antrenament de ardere a grăsimilor 5/5	Acest program susține un antrenament funcțional și activează metabolismul. În primele 40 de secunde este vorba despre solicitarea mușchilor. În următoarele 20 de secunde, scopul este de a stimula circulația în straturile superioare de piele și de grăsime.	7-85 Hz	350 μs	5/5	25

#	Antrenament	Descriere	Frecvență*	Lungime impulsuri*	Ciclu de funcționare*	Durăță (min.)
P-07	 Masaj intens	Relaxați-vă și bucurați-vă de programul de masaj intens. Frecvența stimulărilor crește încet (de la 7 până la 40 Hertz). Programul este adecvat și pentru încălzirea musculaturii.	7-40 Hz	400 μ s	-	20
P-08	 Antelope Ride	Un program intensiv combinat de forță - adecvat pentru dezvoltarea musculaturii în timpul antrenamentelor de fitness și de bază. Frecvența stimulărilor crește încet (de la 40 până la 60 Hertz). Variația constantă previne efectele cauzate de obișnuință. Cu acest program vă antrenați în intervalul de stimulare 4/4.	40-60 Hz	400 μ s	4/4	20
P-09	 Regenerare pasivă	Lăsați-vă cu adevărat stimulat – și răsfățați-vă mușchii: Acest program de regenerare relativ intens și pasiv are de toate. Așa-numitele frecvențe de stimulare (5-20 Hertz) stimulează circulația sanguină și metabolismul. Deoarece nu se declanșează contracții musculare complete, se simte mai degrabă ca un masaj. De aceea, vă recomandăm să nu faceți exerciții în cadrul acestui program. Așadar, odihniți-vă și lăsați centura să lucreze pentru dumneavoastră ;)	5-20 Hz	350 μ s	-	20

Intensitatea

Intensitatea determină puterea impulsurilor, adică cantitatea de sarcină electrică care circulă într-un anumit timp. Cu cât este mai mare, cu atât sunt stimulate mai multe fibre musculare.

*Frecvența

Frecvența determină cât de des apare un impuls electric într-un anumit interval de timp. De aici rezultă cât de des se contractează fibrele musculare individuale. Această valoare nu poate fi modificată la programele Antelope.

*Lungimea impulsurilor (durata impulsurilor)

Lungimea sau durata impulsurilor descrie timpul în care impulsurile electrice ajung în mușchi. Cu cât aceasta este mai lungă, cu atât mușchiul este stimulat mai intens și mai profund.

*Ciclu de funcționare


Intervalul de stimulare, denumit și ciclu de funcționare, determină raportul dintre fazele de stimulare și pauzele de stimulare din timpul unui antrenament. Unele programe EMS necesită aceste pauze pentru musculatura dumneavoastră.

Programe cu ciclu de funcționare

Unele programe necesită un interval de stimulare. Acesta ar putea arăta astfel:

Exemplu: alegeți un program cu ciclul de funcționare „4 sec. PORNIT, 4 sec. OPRIT”. Acesta rulează

acum cu un interval repetat de patru secunde de stimulare și patru secunde de pauză.

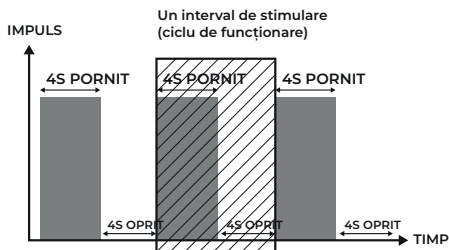

EXEMPLU

TIMP PORNIT = fază de stimulare de 4 secunde

TIMP OPRIT = pauză de stimulare de 4 secunde

Programe fără ciclu de funcționare

Unele programe nu au un ciclu de funcționare. În acest caz, mușchii dumneavoastră sunt stimulați continuu.



TIMP PORNIT = constant și continuu

9. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Scoateți bateriile din dispozitiv înainte de fiecare curățare.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu soluție slabă de săpun.
- Protejați dispozitivul împotriva căderii.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul dispozitivului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați dispozitivul din nou abia când este complet uscat.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici sau abrazivi pentru curățare.
- Centura nu este lavabilă în mașina de spălat. Dacă ați înlăturat dispozitivul (unitatea de comandă) de pe centură, puteți curăța centura cu apă caldă. Utilizați în acest scop leșie de săpun sau detergent lichid. Nu utilizați înălbitori.

10. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Pentru a achiziționa accesorii și piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, accesoriile și piesele de schimb sunt disponibile și în comerț.

Denumire	Număr de articol sau număr de comandă
Set de accesorii, compus din: <ul style="list-style-type: none"> • 2x electrozi adezivi (45x45 mm) • 1x cablu de racordare • 1x exemplar din instrucțiunile succinte 	Art. 647.05

11. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, dispozitivul nu trebuie eliminat ca deșeu la gunoier menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu



conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor.

Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerțiantul de echipamente electrice. Aveți obligația legală de a elimina bateriile ca deșeu.

Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:


Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



12. DATE TEHNICE

Tip	Antelope Corefit II
Forma undei de ieșire	formă simetrică, dreptunghiulară, bifazică
Tensiune de ieșire	max. 70 V pp ±10 % (500 ohmi)
Curent de ieșire	max. 140 mA pp ±10 % (500 ohmi)
Frecvența impulsurilor	5–85 Hz ±10 %
Durata impulsurilor	250–400 μs ±10 %
Alimentare cu tensiune	3 x 1,5 V AAA (tip LR 03)
Timp de utilizare	20–30 de minute
Intensitate	reglabilă de la 0 la 40
Dimensiune electrozi	aprox. 11 x 12 cm
Greutate fără baterii	~ 350 g (fără baterii și prelungitor)
Mărimea centurii pentru o circumferință a taliei de:	aprox. 75 până la aprox. 130 cm
Condiții de funcționare	10 °C până la +40 °C, 20–65 % umiditate relativă a aerului

Condiții de depozitare	0 °C până la +55 °C, 10–90 % umiditate relativă a aerului
------------------------	--

 În cazul utilizării dispozitivului în afara domeniului specificațiilor, nu se garantează o funcționare ireproșabilă! Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice în vederea îmbunătățirii și dezvoltării ulterioare a produsului.

13. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



881.06_Corefit-IL_2024-05-23_04_IM2_Antelope_RO