

beurer

FM 150 Pro



RO Set pentru detensionarea picioarelor
Instrucțiuni de utilizare



CE 0197



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau dacă nu funcționează corect. În aceste cazuri, contactați serviciul pentru clienți.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către Serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat ca deșeu. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie aruncat.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.


Cuprins

1. Pachet de livrare	3	8. Curățare și întreținere	11
2. Explicația simbolurilor	3	8.1 Curățarea manșetelor	11
3. Indicații de avertizare și de siguranță	4	8.2 Depozitare	11
4. Utilizarea conform destinației	6	9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	11
5. Descrierea aparatului	7	10. Eliminarea ca deșeu	12
6. Punerea în funcțiune	7	11. Date tehnice	12
6.1 Punerea în funcțiune cu baterii	8	12. Element de rețea	12
6.2 Punerea în funcțiune cu elementul de rețea	8	13. Garanție/Service	13
7. Utilizare	8		
7.1 Începerea utilizării	8		
7.2 Încetarea utilizării	10		

1. Pachet de livrare

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea cutiei este ireproșabilă și că pachetul este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că setul pentru detensionarea picioarelor și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau departamentului de service.

- 1 x manșetă pentru picior dreapta
- 1 x manșetă pentru picior stânga
- 1 x manșetă pentru coapsa dreaptă
- 1 x manșetă pentru coapsa stângă
- 2 x 2 furtunuri de aer
(1 set alb, 1 set gri)
- 1 x comutator de mână
- 1 x geantă de depozitare
- 4 x baterii AA (1,5 V)
- 1 x alimentator
- 1 x prezentele instrucțiuni de utilizare

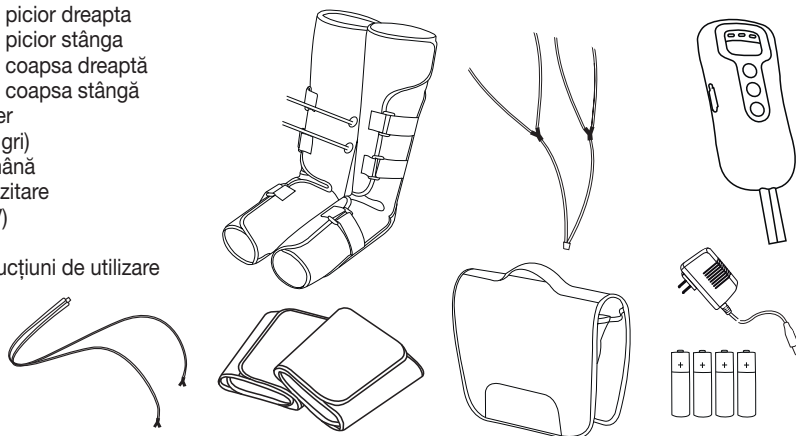


2. Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.		Temperatură de transport și umiditate a aerului la transport admisă
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.		Alimentator de comutare
	Indicație Indicație privind informații importante.		Protejat împotriva corpurilor străine solide cu diametrul de minim 12,5 mm
	Țineți cont de instrucțiunile de utilizare		Aparat protejat împotriva corpurilor străine ≥12,5 mm și împotriva picăturilor de apă pe diagonală
	Producător		Curent continuu
	Clasa de protecție II		Număr serie
	Element de utilizare tip BF		Radiații electromagnetice de joasă frecvență
			Adecvat numai pentru utilizarea în spații interioare
			Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

	Umiditate a aerului și temperatură de funcționare admise
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Codul lotului
	Produs medical
	Reprezentant autorizat al Comisiei Europene
	Nu eliminați la gunoii menajer baterii care conțin substanțe nocive
	Data de fabricație
	Polaritatea unui conector de alimentare c.c.
	Transformator de siguranță și izolare, protejat împotriva scurtcircuitelor
	Eficiență energetică, nivelul 6

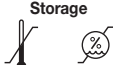	Umiditate a aerului și temperatură de depozitare admise
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Unique Device Identifier (UDI) identificator pentru identificarea unică a produsului
	Număr de articol
	Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Temperatura ambiantă nominală
	Simbolul Distribuitor
	Nu folosiți adaptorul de rețea dacă ștecărul este deteriorat.
	Consum nominal c.a.
	Putere de ieșire nominală c.c.

Indicație

Setul pentru detensionarea picioarelor este adecvat pentru reutilizare după curățarea manșetelor.

3. Indicații de avertizare și de siguranță

Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale.

AVERTIZARE

Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

AVERTIZARE

Nu utilizați setul pentru detensionarea picioarelor

- dacă picioarele prezintă modificări patologice sau sunt vătămate (de exemplu, dacă aveți oase fragile, răni deschise, etc.),
- în timpul sarcinii,
- la animale,
- la activități în timpul cărora o reacție neprevăzută poate fi periculoasă,
- după ce ați luat substanțe care reduc capacitatea de percepție (de exemplu, calmante, alcool),
- mai mult de 30 de minute (pericol de supraîncălzire),
- lăsați setul pentru detensionarea picioarelor să se răcească minim 20 minute înainte de următoarea utilizare,

- la pacienți în stare acută supuși unui tratament medical suplimentar.

Întrebați-vă medicul curant dacă utilizarea setului pentru detensionarea picioarelor reprezintă un pericol în cazul în care suferiți de afecțiuni acute sau boli preexistente și în special în următoarele cazuri:

- Dacă suferiți de o afecțiune gravă sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul picioarelor.
- Dacă picioarele prezintă răni acute, deschise sau închise.
- În cazul intervențiilor chirurgicale la nivelul picioarelor, dacă, din punct de vedere medical, picioarele nu au fost vindecate complet.
- În cazul în care se suspectează existența sindromului de compartiment muscular la nivelul gambei.
- În cazul bolilor de piele la nivelul picioarelor.
- Dacă purtați un stimulator cardiac, implanturi sau alte elemente auxiliare.
- Dacă suferiți de tromboză sau în caz de suspiciune de tromboză; printre altele, în cazul suferirii unui eveniment trombotic venos, al trombozei venoase cunoscute sau în caz de suspiciune de tromboză venoasă a membrelor inferioare.
- În cazul bolii ocluzive arteriale, indiferent de stadiul vasoconstricției diagnosticate.
- Dacă suferiți de diabet.
- Dacă aveți dureri a căror cauză este necunoscută.
- Dacă aveți inflamații acute.
- Dacă suferiți de tulburări ale sistemului conductor al inimii, în special în caz de retenție de apă la nivelul picioarelor.
- Dacă suferiți de o boală arterială în stadiu avansat.
- Dacă suferiți de edem pulmonar.
- În caz de hipertensiune.
- În cazul tumorilor maligne suspectate sau existente.
- În cazul afectării circulației limfatice la nivelul picioarelor.



AVERTIZARE

- Pentru a evita arsurile sau prejudiciile materiale, acest produs nu trebuie utilizat împreună cu aparate de înaltă frecvență.
- Biocompatibilitate. Niciunul dintre materialele cu care pacientul sau utilizatorul intră în contact nu prezintă un risc ridicat. Produsele noastre sunt alcătuite din materiale utilizate în mod obișnuit.
- Nu atingeți adaptorul de rețea cu tensiune continuă, pentru a evita pericolul de electrocutare.
- În timpul utilizării, așezați comutatorul de mână în apropierea corpurilor.
- Manevrați produsul cu grijă, astfel încât să nu cadă și să vă rănească.
- Persoanele pentru care se aplică următoarele trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza acest produs: Femei însărcinate sau aflate la menstruație, persoane cu piele sensibilă, cu boli de inimă, persoane cu valori neobișnuite ale tensiunii, cu tumori maligne, boli cerebrovasculare, afecțiuni acute sau persoane care urmează un tratament medical.
- Persoanele cu tulburări senzoriale ale pielii sau care nu sunt vulnerabile la presiune nu trebuie să utilizeze acest produs.
- Nu utilizați acest produs când faceți baie sau în timpul somnului.
- Pacienți cu hemoragie cerebrală: Produsul nu trebuie utilizat de către pacienți a căror stare nu este stabilă. Pacienții cu afecțiuni secundare trebuie să utilizeze acest produs sub supraveghere medicală.
- Pacienții cu inflamații purulente, septicemie acută și hipertermie continuă nu trebuie să utilizeze acest produs.
- Pacienții cu boli cardiovasculare și cerebrovasculare nu trebuie să utilizeze acest produs.
- Utilizați acest produs numai la nivelul picioarelor și labelor picioarelor. Pacienții cu boli de piele la nivelul picioarelor și labelor picioarelor nu trebuie să utilizeze acest produs.
- Nu vă deplasați în timpul utilizării produsului, deoarece acest lucru poate provoca dureri pacienților. De asemenea, în acest mod puteți deteriora produsul.
- Acest produs nu trebuie utilizat de copiii sau persoanele cu tulburări ale stării de conștiență.
- În cazul în care produsul provoacă dureri utilizatorului, acesta trebuie să întrerupă imediat administrarea produsului și să consulte un medic.
- Nu utilizați produsul împreună cu alte aparate medicale electrice, de ex. stimulatoare cardiace, bypass-uri cardiopulmonare sau alte aparate electronice de terapie intensivă, electroradiografe și alte aparate medicale electrice. Nerespectarea acestor indicații poate avea ca rezultat apariția pericolelor.
- Nu dezasamblați, reparați și nu efectuați modificări la nivelul produsului, pentru a evita apariția unei funcționări necorespunzătoare sau a pericolului de electrocutare.
- În cazuri de necesitate, poziționați produsul astfel încât ștecărul să fie introdus în partea laterală cu ușurință.

ATENȚIE

- În cazul în care clientul utilizează acest produs împreună cu dispozitive chirurgicale de înaltă frecvență, pot apărea defecțiuni la nivelul produsului. Dacă produsului este utilizat în apropierea (1 m) aparatelor de terapie cu unde scurte sau cu microunde, este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător.
- Nu efectuați nicio modificare la nivelul aparatului fără acordul producătorului.
- Decuplați produsul de la sursa de alimentare cu energie după utilizarea acestuia sau pe perioada în care nu este utilizat.
- Nu utilizați acest produs în locuri cu temperaturi ridicate, risc de incendiu, radiații electromagnetice sau umiditate ridicată a aerului.

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare

Fiind un aparat electric, acest set pentru detensionarea picioarelor se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

De aceea, setul pentru detensionarea picioarelor nu trebuie utilizat

- decât împreună cu elementul de rețea livrat și la tensiunea de rețea menționată pe plăcuța de identificare,
- atunci când setul pentru detensionarea picioarelor sau accesoriile aferente prezintă defecțiuni vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat setul pentru detensionarea picioarelor și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde. Nu strângeți, îndoiți sau rotiți cablul. Nu îl perforați cu ace sau obiecte ascuțite. Nu dezasamblați comutatorul de mână, indiferent de situație.

Asigurați-vă că aparatul, comutatorul de mână și cablul electric nu intră în contact cu apă, aburi sau alte lichide. Prin urmare, utilizați aparatul doar în spații interioare uscate (de exemplu, nu-l utilizați NICIODATĂ în cadă, la saună).

Nu încercați niciodată să scoateți un set pentru detensionarea picioarelor căzut în apă. Scoateți fără întârziere elementul de rețea din priză.

Nu utilizați aparatul dacă setul pentru detensionarea picioarelor sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile. Nu expuneți aparatul șocurilor și nu-l lăsați să cadă.

AVERTIZARE: Reparații

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

AVERTIZARE: Pericol de incendiu

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare prezintă pericol de incendiu în anumite condiții!

Prin urmare, nu utilizați aparatul

- acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne, ...
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.

AVERTIZARE: Baterii

- Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- Pericol de înghițire! Copiii pot înghiți bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor!
- Respectați marcasele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
- Dacă bateria s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- Pericol de explozie! Nu aruncați nicio baterie în foc.
- În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Înlocuiți întotdeauna toate bateriile simultan.
- Nu utilizați acumulatele!
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți bateriile.

ATENȚIE: Manipulare

Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Aveți grijă ca furtunurile de aer să nu fie îndoite.
- Nu vă așezați și nu stați niciodată cu toată greutatea pe manșetele pentru picioare. Nu așezați obiecte pe manșetele pentru picioare sau pe comutatorul pentru mâini.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

4. Utilizarea conform destinației

Utilizați setul pentru detensionarea picioarelor exclusiv la nivelul picioarelor. Setul pentru detensionarea picioarelor este destinat exclusiv **utilizării private**. Setul pentru detensionarea picioarelor **NU** este destinat utilizării comerciale. Nu poate înlocui tratamentul medical.

AVERTIZARE

Utilizați aparatul exclusiv în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă! Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate prin utilizarea necorespunzătoare sau neglijență a aparatului.

Indicații privind utilizarea

- Pentru îmbunătățirea circulației sângelui venos.
- Pentru prevenirea varicelor și a telangiectaziilor.
- Pentru reducerea umflăturilor și a senzației de greutate la nivelul picioarelor.
- Pentru tratarea febrei musculare apărută în urma practicării unui sport.
- Pentru tratarea rănilor produse în timpul practicării unui sport, de exemplu contuzii și entorse.
- Pentru tratarea hematoamelor.


Loc de aplicare: în spații închise

În cazul în care aveți picioare obosite și umflate și suferiți de afecțiuni venoase, utilizați exclusiv furtunul gri inclus în pachetul de livrare și nu utilizați manșetele pentru coapse (instrucțiunile de montaj sunt incluse în Capitolul 8.1, punctul 4.b).

Utilizați manșetele pentru coapse incluse în pachetul de livrare și furtunurile albe compatibile (instrucțiunile de montaj sunt incluse în Capitolul 8.1, punctul 2 până la 4.a), în cazul în care sunteți sănătos din punct de vedere fizic și nu prezentați vătămări/umflături la nivelul picioarelor. În cazul utilizării suplimentare a manșetelor pentru coapse, mușchii se pot detensiona și pot stimula circulația sanguină.

5. Descrierea aparatului

1. Orificiu de intrare a aerului („in“)
2. Racord electric
3. Orificiu de evacuare a aerului
4. Buton PORNIRE/OPRIRE
5. Tasta orificiului de evacuare a aerului
6. Tasta Stop*
7. Tasta timer 10/20/30 min.
8. Furtunuri de aer (albe) pentru utilizare suplimentară a manșetelor pentru coapse
9. Furtunuri de aer (gri) pentru utilizarea exclusivă a manșetelor pentru gambe
10. Racord pentru furtunuri de aer

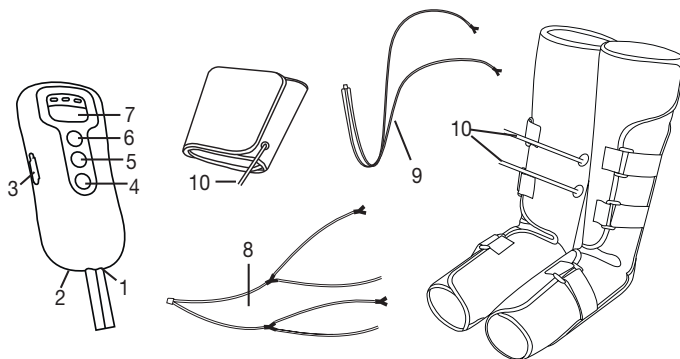

(*Tasta Stop întrerupe pomparea în cazul unei presiuni neplăcute și ridicate)

6. Punerea în funcțiune

- Îndepărtați ambalajul.
- Îndepărtați stratul gri protector de pe scaii manșetelor pentru picioare și coapse.
- Verificați aparatul, elementul de rețea și cablul în privința deteriorărilor.
- Puteți utiliza setul pentru detensionarea picioarelor cu baterii (4 x tip 1,5 V AA alcaline tip LR06) sau cu elementul de rețea inclus în pachetul de livrare.

i Indicație

Puteți utiliza aparatul fie cu adaptorul de rețea inclus în pachetul de livrare, fie cu baterii. Recomandăm utilizarea adaptorului de rețea din rațiuni de durabilitate.

6.1 Punerea în funcțiune cu baterii


1. Deschideți compartimentul pentru baterii de pe partea posterioară a comutatorului de mână.
2. Introduceți două baterii de tip 1,5 V AA (alcaline de tip LR06). Trebuie să vă asigurați în mod obligatoriu că bateriile sunt introduse conform marajului, respectând polaritatea. Țineți cont de simbolurile grafice din compartimentul pentru baterii. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
3. Închideți compartimentul pentru baterii de pe partea posterioară a comutatorului de mână până când acesta se fixează sonor și vizibil.

6.2 Punerea în funcțiune cu elementul de rețea

Indicație

Înainte de punerea în funcțiune cu elementul de rețea, aveți grijă să nu existe nicio baterie în comutatorul de mână.

1. Racordați elementul de rețea la comutatorul de mână conform imaginii.
2. Introduceți celălalt capăt al elementului de rețea într-o priză adecvată.
3. Setul pentru detensionarea picioarelor este acum pregătit de utilizare.

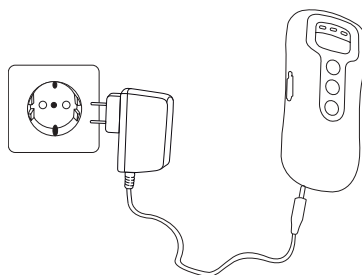

7. Utilizare


7.1 Începerea utilizării

ATENȚIE:

- Evitați deschiderea scaiului de pe manșete pe parcursul utilizării, deoarece acest lucru ar putea afecta funcționalitatea aparatului. Deschideți scaiul manșetelor sau apăsați tasta Stop numai atunci când presiunea de la nivelul picioarelor dumneavoastră devine neplăcută în timpul utilizării.
- În timpul utilizării, evitați îndoirea furtunului de aer.
- În timpul utilizării, aveți grijă ca manșetele să nu fie acoperite de păături sau de alte obiecte.

1. Respectați indicațiile din capitolul „Punerea în funcțiune”.


2. Așezați manșetele pentru picioare și coapse succesiv, conform imaginii, pe piciorul gol sau pe articole vestimentare mulate (de ex. dresuri) de la nivelul coapselor, pulpelor și labelor picioarelor. Manșetele trebuie strânse numai atât încât sub acestea să încapă două degete. În cazul în care manșetele vă strâng, așezați-le astfel încât sub acestea să încapă o palmă.

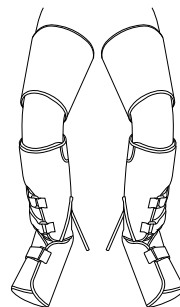

ATENȚIE:

În cazul utilizării exclusive a manșetelor pentru gambe, nu este necesară aplicarea manșetelor pentru coapse.




3. Pentru a atinge rezultate optime, țineți piciorul în poziție ușor îndoită/ridică în timpul utilizării, pentru ca sângele să poată circula mai bine.
- Manșeta pentru piciorul stâng și cea pentru coapsa stângă sunt inscripționate cu un „L” pe partea interioară.
- Manșeta pentru piciorul drept și cea pentru coapsa dreaptă sunt inscripționate cu un „R” pe partea interioară.

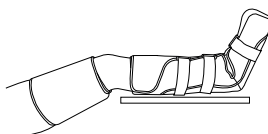

4. a. Utilizarea manșetelor pentru coapse și gambe


Conectați furtunurile de aer albe la manșete. Aveți grijă ca furtunurile de aer să fie fixate și să nu existe pericolul alunecării acestora.

Introduceți celălalt capăt al furtunului de aer în orificiul de intrare a aerului („in”) de la nivelul comutatorului pentru mâini.

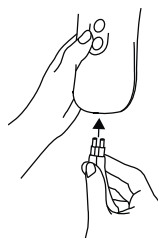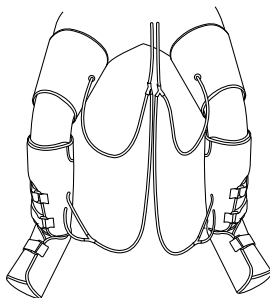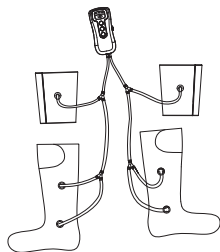

4. b. Utilizarea manșetelor pentru gambe

Conectați furtunurile de aer gri la manșetele pentru gambe (1.). Aveți grijă ca furtunurile de aer să fie fixate și să nu existe pericolul alunecării acestora. Introduceți celălalt capăt al furtunului de aer în orificiul de intrare a aerului („in”) de la nivelul comutatorului pentru mâini (2.).

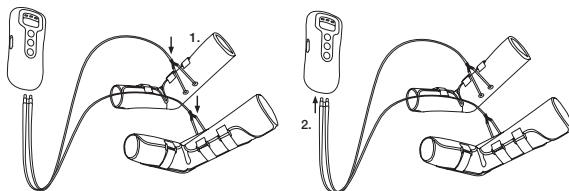

ATENȚIE

În cazul în care doriți să comutați între cele două utilizări (utilizarea cu sau fără manșeta pentru coapse), aveți grijă să nu fie scoase cele două capete scurte ale furtunurilor, de culoare albă, aflate la nivelul manșetei pentru gambe. Acestea sunt necesare pentru ambele utilizări.


4. Apăsați tasta **PORNIRE/OPRIRE** pentru a porni setul pentru detensionarea picioarelor. Imediat ce aparatul este pornit, LED-ul timerului luminează timp de 20 de minute.

5. Aveți în vedere că, prin modificarea setării timer-ului, acesta începe din nou numărătoarea de la zero.




ATENȚIE



Recomandăm un timp de utilizare cuprins între 20 și 30 de minute. În cazul utilizării pentru o perioadă mai lungă, poate apărea senzația de amorțeală la nivelul picioarelor, iar aparatul se poate supraîncălzi.

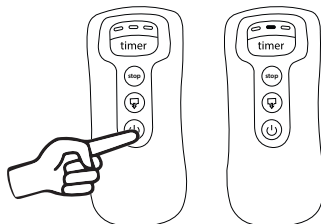

6. Prin intermediul dispozitivului de reglare al presiunii aerului, selectați intensitatea dorită. Apoi începeți de la treapta cea mai de jos, pentru a vă obișnui treptat cu masajul.

Pentru un efect optim, intensitatea setată trebuie să fie puternică, dar nu neplăcută.

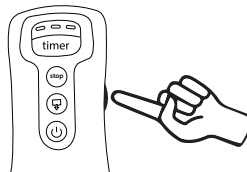

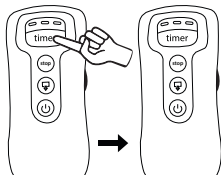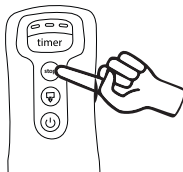7. Apăsați tasta „Timer” pentru a comuta între cele trei setări de timp - 10 minute, 20 minute și 30 minute. Valoarea standard este de 20 minute. Atunci când timpul rămas este de 5 minute, afișajul timpului actual luminează intermitent lent; atunci când timpul rămas este de 1 minut, afișajul timpului actual luminează intermitent rapid.	
8. În cazul în care, în timpul utilizării apare o senzație de presiune prea puternică sau neplăcută, apăsați tasta „Stop” pentru a întrerupe tratamentul.	

Indicație

Setul pentru detensionarea picioarelor începe acum să vă maseze picioarele succesiv și alternativ. Picioarele nu sunt niciodată masate uniform. Aceasta nu reprezintă o funcționare eronată a aparatului.



Aparatul prezintă o funcție de oprire automată setată la o durată maximă de utilizare de 30 minute.





Când bateriile sunt aproape descărcate, LED-urile timer-ului luminează intermitent de la dreapta la stânga. Aparatul se oprește după câteva secunde și se află acum în modul standby timp de 30 de secunde. În acest timp, toate cele 3 LED-uri ale timer-ului luminează.

7.2 Încetarea utilizării

Pentru a înceta utilizarea, trebuie să opriți aparatul și apoi să lăsați aerul să iasă din manșete.

Procedați după cum urmează:

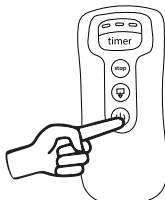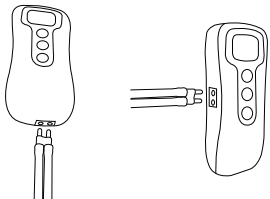1. Opriți setul pentru detensionarea picioarelor prin apăsarea tastei PORNIT/OPRIT de pe comutatorul de mână. LED-ul timer-ului setat se stinge. Aparatul se află acum în modul standby pentru 30 de secunde. În acest timp, toate cele 3 LED-uri luminează.	
2. În timpul celor 30 de secunde în care aparatul se află în modul standby, scoateți furtunul de aer din comutatorul de mână și introduceți tubul de aer în orificiul lateral de evacuare a aerului (↙↘) de la nivelul comutatorului de mână și apăsați tasta orificiului de evacuare a aerului [5]. În acest timp, toate cele 3 LED-uri ale timer-ului iluminează intermitent. Se opresc din nou atunci când procesul este finalizat.	

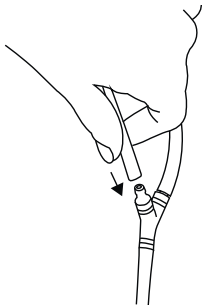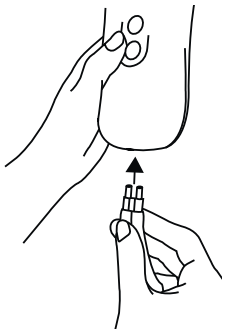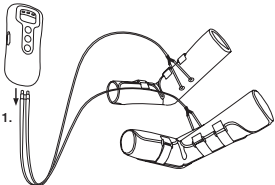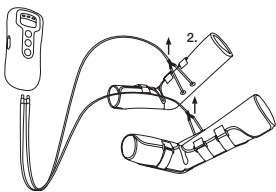3. a. Deschideți scaiul și scoateți manșetele. Trageți furtunurile de aer albe din „piesa de legătură Y” de la nivelul manșetelor pentru picioare, imediat ce capetele scurte ale furtunurilor albe sunt introduse conform imaginii în manșetele pentru picioare. De asemenea, trageți furtunul de aer din piesa de legătură, aflată direct la nivelul manșetelor pentru coapse. După ce ați utilizat aparatul cu ajutorul alimentatorului, scoateți-l din priză și din comutatorul de mână.		
3. b. Deschideți scaiul și scoateți manșetele. Trageți furtunurile de aer gri din „piesa de legătură Y” de la nivelul manșetelor pentru picioare, imediat ce capetele scurte ale furtunurilor sunt introduse conform imaginii în manșetele pentru picioare. După ce ați utilizat aparatul cu ajutorul alimentatorului, scoateți-l din priză și din comutatorul de mână.		

8. Curățare și întreținere

8.1 Curățarea manșetelor

- Înainte de fiecare operație de curățare, închideți aparatul și scoateți furtunurile de aer (cu excepția porțiunilor finale scurte ale furtunurilor) din manșete și din comutatorul de mână.
- Curățați manșetele folosind o cârpă moale, ușor umezită. Nu utilizați agenți de curățare chimici sau abrazivi pentru curățare.
- Utilizați manșetele din nou numai după ce sunt complet uscate.

8.2 Depozitare

- Atunci când nu utilizați aparatul timp îndelungat, scoateți bateriile din aparat. Bateriile scurse pot deteriora aparatul.
- Nu îndoiți prea tare furtunurile de aer și manșetele.
- Depozitați aparatul în ambalajul original, într-un loc răcoros și aerisit.

9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Manșetele nu se umflă	Bateriile sunt descărcate	Schimbați bateriile din comutatorul de mână.
	Elementul de rețea nu este conectat	Conectați elementul de rețea la o priză corespunzătoare.
	Furtunul de aer nu este corect introdus	Introduceți din nou furtunul de aer.
În timpul utilizării, LED-urile timer-ului de la nivelul comutatorului de mână încep să lumineze intermitent și aparatul se oprește	Bateriile sunt descărcate	Schimbați bateriile din comutatorul de mână.

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactați serviciul pentru clienți.

10. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală în acest sens.

Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.



11. Date tehnice

Presiunea manșetei	max. 120 mmHg (în cazul unei utilizări corecte, conform capitolului 9.1.)
Dimensiunea manșetei	29–53 cm
Durată sincronizare	10–30 minute cu o variație de $\pm 10\%$
Alimentare cu tensiune la funcționarea cu baterii	6,0 V c.c. (4 x 1,5 V —= baterii AA (alcaline tip LR06))
Condiții de funcționare admise	+5 °C până la +40 °C, 15 - 93 % umiditate relativă a aerului (fără condens), 700 hPa– 1060 hPa presiune ambiantă.
Condiții de depozitare admise	-25 °C până la +70 °C, 0 - 93 % umiditate relativă a aerului (fără condens), 700– 1060 hPa presiune ambiantă.
Condiții de transport admise	-25 °C până la +70 °C, 0 - 93 % umiditate relativă a aerului (fără condens), 700–1060 hPa presiune ambiantă.
Dimensiuni	Manșete pentru picioare: 61 x 67 x 0,5 cm Manșetă pentru coapsă: 85 x 23,5 x 0,5 cm Comutator de mână: 17 x 7,7 x 3 cm
Greutate totală	cca. 1700 g (fără alimentator)
Clasă de protecție	
Clasificare	Tip BF

Numărul de serie se află pe dispozitiv sau în compartimentul pentru baterii.

12. Element de rețea

Alimentarea cu tensiune la conectarea la rețea	Intrare: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Ieșire: 6,0 V c.c., 0,5 A, 3,0 W
Polaritate	
Clasă de protecție	

Indicații privind compatibilitatea electromagnetică

- Aparatul corespunde cerințelor Directivei 93/42/CEE privind produsele medicale, ale legii privind produsele medicale, precum și ale standardului european EN 60601-1-2 (în conformitate cu CISPR 11, IEC61000-4-2, IEC61000-4- 4, IEC61000-4- 5, IEC61000-4- 6, IEC61000-4- 11, IEC61000-4-8) și este supus unor măsuri de precauție speciale referitoare la compatibilitatea electromagnetică. Aparatul este adecvat pentru utilizare în toate mediile prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare, inclusiv pentru utilizare la domiciliu.
- Aparatul este adecvat pentru utilizare în toate mediile care prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare, inclusiv pentru utilizare la domiciliu.

- În cazul existenței interferențelor electromagnetice, aparatul poate fi folosit eventual doar într-o măsură limitată. Drept rezultat pot apărea de exemplu mesaje de eroare sau o defecțiune a afișajului/aparatului.
- Trebuie evitată utilizarea acestui aparat în imediata apropiere a altor aparate sau cu alte aparate suprapuse, deoarece acest lucru ar putea duce la o funcționare eronată. Dacă totuși este necesară utilizarea în modul menționat, trebuie să vă asigurați că acest aparat precum și celelalte aparate funcționează în mod corespunzător.
- Utilizarea altor accesorii decât cele stabilite sau puse la dispoziție de către producătorul acestui aparat poate cauza emisii electromagnetice accentuate sau o rezistență electromagnetică redusă a aparatului și poate duce la o funcționare eronată.
- Nerespectarea acestei indicații poate duce la diminuarea performanței aparatului.

13. Garanție/Service

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.



BEURER UK Ltd.

Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane North, WA3 2SH Lowton, United Kingdom

Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany, www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com, www.beurer-healthguide.com



Lotus NL B.V.

Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel.: +31644168999



Shenzhen Pango Medical Electronics Co., Ltd.

Address: Building 2, No. 25 Fenghuang Road, Industrial Zone,
Xikeng First Village, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen,
518115 Guangdong, P. R. China

