

beurer FT 16 express

DEUTSCH

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundenadresse.

- Thermometer • Schutzkappe • Gebrauchsanweisung • 1 x 1,5 V Batterie LR 41

ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

⚠️ WARNUNG
Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.
⚡ VORSICHT
Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.
HINWEIS
Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Gerät oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen
Anleitung beachten Vor Beginn der Arbeit und /oder dem Bedienen von Geräten oder Maschinen die Anleitung lesen
(Elektro-)Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
Hersteller
Herstellungsdatum
CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer. 1-7 = Kunststoff, 20-22 = Papier und Pappe
Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechende der kommunalen Vorschriften entsorgen.
Geschützt gegen feste Fremdkörper, 12,5 mm Durchmesser und größer und gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser
Gleichstrom
Unique Device Identifier (UDI) Kennung zur eindeutigen Produktidentifikation
Artikelnummer
Seriennummer
Medizinprodukt
Typenummer
Anwendungsteile Typ BF
Temperaturbereich
Feuchtigkeitbereich
Importeur
Schweizer Bevollmächtigter

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Zweckbestimmung

Das Thermometer dient ausschließlich zur oralen, rektalen oder axialen Messung der menschlichen Körpertemperatur. Das Thermometer ist zur privaten Anwendung im häuslichen Umfeld und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Zielgruppe

Das Fieberthermometer ist zur medizinischen Versorgung in häuslicher Umgebung, nicht in professionellen Einrichtungen zur Gesundheitsfürsorge, vorgesehen. Die Anwendung des Fieberthermometers ist für Neugeborene ab 2,5 kg sowie für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder unter Aufsicht geeignet, während die Eigenregulierung für alle Personen ab 12 Jahren möglich ist.

Klinischer Nutzen

Die aufgetragenen Messungen können bei der Diagnose und Therapie unterstützen.

Indikation

Es wird eine erhöhte Körpertemperatur vermutet. Der Anwender kann mit dem Thermometer schnell und einfach die menschliche Körpertemperatur im Mund, der Mundhöhle oder der Achsel messen und somit bestimmen, ob die betroffene Person Fieber hat.

Kontraindikation

- Die Anwendung des Thermometers an verschiedenen Personen kann bei bestimmten akuten, infektiösen Erkrankungen aufgrund einer möglichen Keimverschleppung, trotz der durchgeführten Reinigung und Desinfektion, unwechsgelblich sein. Fragen Sie im Einzelfall Ihren behandelnden Arzt.

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beobachtet werden und von dieser Anweisungen darüber erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

⚠️ WARNUNG

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von Kindern, Tieren und Ungeziefer fern.
- Die von Ihnen selbst ermittelten Messwerte können nur zu Ihrer Information dienen – sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung! Besprechen Sie Ihre gemessenen Werte mit dem Arzt und begründen Sie daraus auf keinen Fall eigene medizinische Entscheidungen (z.B. hinsichtlich der Dosierung von Medikation)!
- Bei auffälligen Temperaturegebnissen wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

⚡ VORSICHT

- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C gelagert wurde, lassen Sie es vor der Verwendung etwa 15 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C – 40 °C akklimatisieren.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Feuchtigkeit, Schutz, starken Temperaturschwankungen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie nicht auf das Thermometer (Messspitze), das kann zu Schäden und Verletzungen führen!
- Kontrollieren Sie das Thermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Die Spitze darf nicht weiter als 90° abgeogen werden!

- Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der Körpertemperatur am Menschen zu verwenden
- Das Thermometer ist nur für die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Messstellen am menschlichen Körper bestimmt.
- Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten.
- Dieses Thermometer ist mit einer flexiblen Messspitze ausgestattet und bringt dadurch mehr Komfort und Sicherheit bei der Messung, insbesondere bei Kleinkindern, Schlafenden oder bewusstseins eingeschränkten Personen.
- Das Thermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

⚠️ WARNUNG

- Explosionsgefahr Brandgefahr** Nichtbeachtung der nachfolgenden Punkte kann zu Personenschäden oder an der Batterie zu Überhitzung, Auslaufen, Entzündung, Bruch, Explosion oder Feuer führen.
- Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien, welche nicht aufgeladen werden dürfen.
- Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien niemals aufstecken, zwangsentladen, erhitzen, zerlegen, öffnen, zerkleinern, deformieren, einkapseln oder modifizieren.
- Niemals Batterien und Kontakte des Batteriefachs kurzschließen.
- Gerät zerstörungsfrei entfernen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entfernt werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.
- Sofern das alle Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

TECHNISCHE ANGABEN

Die Genauigkeit dieses Thermometers wurde sorgfältig geprüft und wurde im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer entwickelt.
Die Genauigkeit des Gerätes in der Heilung entscheidet die jeweils geltenden nationalen Bestimmungen, ob messtechnische Kontrollen mit geeigneten Mitteln durchzuführen sind. Technische Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor.

Type	FT 16
Messmethode	Kontaktmessung
Maßeinheiten	Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F)
Dreikreisart	Direktmodus
Messbereich	32,0 °C (89,6 °F) bis 42,9 °C (109,2 °F)
Messgenauigkeit	+0,1 °C von 35,5 °C – 42,0 °C (95,9 °F - 107,6 °F) bei 18 °C – 28 °C (64,4 °F - 82,4 °F) Umgebungstemperatur +0,2 °C für restliche Mess- und Umgebungstemperaturbereiche
Betriebsbedingungen	5 °C (41 °F) bis 40 °C (104 °F), bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15% bis 95%, Umgebungsdruck: 700–1.060 hPa
Aufbewahrungs- und Transportbedingungen	-20 °C (-4 °F) bis 55 °C (131 °F), bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15% bis 95%
Gewicht	ca. 13,3 g (mit Batterie)
Abmessungen (BxTxH)	141 x 23 x 13 mm
IP Klasse	IP 27
Erwartete Lebensdauer	Information zur Lebensdauer des Produkts finden Sie auf der Homepage.

HINWEIS

- Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

Hinweise zu elektromagnetischer Verträglichkeit

- Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.

- Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infolgedessen können z.B. Fehleindmeldungen oder ein Ausfall des Displays/Grades auftreten.

- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Geräte und die anderen Geräte beachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
- Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störströmungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.
- Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Gerätes führen.

INFORMATIONEN ZU DIESEM THERMOMETER

Temperaturmessung im After (rektal)

Diese Messmethode ist am zuverlässigsten und am genauesten. Führen Sie hierzu die Thermometerspitze vorsichtig 2–3 cm in die After ein.

Temperaturmessung in der Mundhöhle (oral)

Führen Sie hierzu die Thermometerspitze in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge oder neben der Zungenwurzel ein.

Temperaturmessung in der Achselhöhle (axillär)

Diese Messmethode ist relativ ungenau und kann deshalb aus medizinischer Sicht nicht empfohlen werden.

Messmethode	Empfohlene Messdauer	Mittlere Abweichung zur rektalen Methode
im After	bis zum Signalton	–
in der Mundhöhle	bis zum Signalton	–0,4 °C bis -1,5 °C (-0,7 °F bis -2,7 °F)
in der Achselhöhle	min. 5 Min.	-0,7 °C bis -2,0 °C (-1,26 °F bis -3,6 °F)

ANWENDUNG

Zum Einschalten drücken Sie kurz die EIN/AUS Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 Sek. einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar. Danach wird der letzte Messwert angezeigt. Danach erscheint der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F). Anschließend wird das Display mit „Lo“ (°F) und im Display wird „Lo“ (°F) angezeigt. Das Thermometer ist messbereit. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „C“ („F“) -Zeichen blinkt. Die Messung wird beendet, wenn eine Temperaturstabilität erreicht ist. Ein akustisches Signal ertönt (10 lange Pieptöne), das „C“ („F“) -Zeichen blinkt nicht mehr und der gemessene Temperaturwert wird angezeigt. Solange die gemessene Temperatur niedriger als 32 °C (89,6 °F) ist, blinkt das Mess-Symbol, „C“ („F“) und im Display wird „Lo“ („Lo“ (°F) angezeigt. Höhere Werte werden direkt angezeigt, z.B. 32,1 °C (89,8 °F). Werden Temperaturen von 37,8 °C (100 °F) oder höher gemessen, ertönt am Fieberkontroll (30,2 Sekunden in 10 Sekunden). Werden Temperaturen über 42,9 °C (109,2 °F) gemessen, so erscheint das Symbol für „Hi“ (°C) („Hi“ °F). Die Messzeit ist verglichen mit herkömmlichen Thermometern stark verkürzt und beträgt bei der rektalen Messung nur ca. 10 Sekunden. Durch Verlängerung der Messdauer über den Signalton hinaus, werden genauere Messergebnisse erzielt. Bei Messungen in der Achselhöhle sollte die empfohlene Messdauer trotz Signalton eingehalten werden. Zur Verlängerung der Batterielebensdauer schalten Sie bitte nach der Messung des Thermometers aus und drücken der EIN/AUS-Taste aus. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Min. automatisch ab.

SPEICHER

Der letzte Messwert wird automatisch gespeichert. Um diesen Wert anzuzeigen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Zunächst führt das Thermometer einen Selbsttest durch. Danach erscheint der zuletzt gespeicherte Messwert für ca. 2 Sek. Anschließend wird der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F) und „Lo“ im Display angezeigt. Das Thermometer ist messbereit und der alte gespeicherte Messwert wird automatisch durch den neuen Messwert ersetzt.

MESSEINHEIT ÄNDERN

Sie können sich die Temperatur in Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) anzeigen lassen. Zum Einstellen halten Sie die EIN/AUS-Taste beim Einschalten länger als 2 Sekunden gedrückt bis sich die Messeinheit ändert. Der gespeicherte Wert wird in der neuen Messeinheit angezeigt.

BATTERIEN

Batterien wechseln

Das Fieberthermometer enthält eine Langzeit Alkali-Mangan-Batterie (LR 41, 1,5 V) mit einer Batterielebensdauer von ca. 2000 Messungen. Die Batterie muss gewechselt werden, wenn das Batteriesymbol am rechten, unteren Rand zu blinken beginnt. Drücken Sie den Batteriefachdeckel am Ende des Gerätes mit den Fingern zusammen und ziehen Sie ihn kräftig nach hinten weg. Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie gleichen Typs. Das + Zeichen auf der Batterie muss nach oben zeigen. Stecken Sie anschließend den Batteriefachdeckel auf das Gehäuse auf.

REINIGUNG UND PFLEGE

Gerät reinigen

Vor und nach jeder Benutzung muss das Gerät gereinigt und desinfiziert werden. Das Thermometer ist wasserdicht und kann zur Reinigung bzw. Desinfektion problemlos in Wasser oder Desinfektionslösung eingetaucht werden. Reinigen Sie das Thermometer vor der Desinfektion. Waschen Sie es dazu mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um Rückstände zu entfernen. Zur Desinfektion stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung. Tauchen Sie die Messspitze des Geräts für 10min in Isopropylalkohol (70%) oder für 15 min in Hellpulver H plus N (Konzentration 1,5%) ein. Spülen Sie die Messspitze des Thermometers mit Wasser nach der Desinfektion ab, um Rückstände des Desinfizierers vollständig zu entfernen. Das Thermometer darf keinesfalls ausgewechselt werden! Andere Desinfektionsmittel oder Methoden können zu Funktionsstörungen oder Beschädigung des Geräts führen.

Gerät lagern

Wenn Sie das Thermometer nicht benutzen, bewahren Sie es bitte in der originalen Schutzkappe auf. Das Gerät darf nicht bei zu hoher oder niedriger Temperatur und Luftfeuchtigkeit („technische Angaben“) im Sonnenlicht in Verbindung mit elektrischem Strom oder an staubigen Orten gelagert oder benutzt werden. Es kann sonst zu Messungenauigkeiten kommen.

WAS TUN BEI PROBLEMEN?

Anzeige	Ursache	Behebung
„Lo“	Die gemessene Temperatur liegt unter 32,0 °C (89,6 °F).	Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie eine Minute und führen Sie anschließend mit korrektem Kontakt und ausreichend Ruhe eine neue Temperaturmessung durch.
„Hi“	Die gemessene Temperatur liegt über 42,9 °C (109,2 °F).	Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie eine Minute und führen Sie anschließend mit korrektem Kontakt und ausreichend Ruhe eine neue Temperaturmessung durch.
„Err“	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Nehmen Sie die Batterie heraus und warten eine Minute. Legen Sie die Batterie wieder ein und schalten das Gerät an. Wenn die Meldung erneut erscheint, wenden Sie sich zur Unterstützung an den Händler.
	Leere Batterie: Batterie-anzeige blinkt, Messung nicht möglich.	Wechseln Sie die Batterie.

ENTSORGUNG

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll zusammen in die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllnahmestellen oder über den Elektrohandel entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten sichergestellt abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Rückgabe der Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Verbleib möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektronik-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmittelfachläden mit einer Gesamtverkaufsstfläche von mindestens 80 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhändler, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimaanlage u.ä.), Bild (64,4 "F - 82,4 "F) Umgebungstemperatur +0,2 °C für restliche Mess- und Umgebungstemperaturbereiche

- Verwandhändler, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimaanlage u.ä.), Bild (64,4 "F - 82,4 "F) Umgebungstemperatur +0,2 °C für restliche Mess- und Umgebungstemperaturbereiche
- Die Mindestumgröße der Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Verbleib möglich.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entfernen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entfernt werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alle Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

- Die Mindestumgröße der Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Verbleib möglich.
- Die Mindestumgröße der Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Verbleib möglich.
- Wenn die Batterie wiederverwendet werden kann, muss diese vor der Entsorgung entfernt werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.
- Sofern das alle Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Type	FT 16
Messmethode	Kontaktmessung
Maßeinheiten	Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F)
Dreikreisart	Direktmodus
Messbereich	32,0 °C (89,6 °F) bis 42,9 °C (109,2 °F)
Messgenauigkeit	+0,1 °C von 35,5 °C – 42,0 °C (95,9 °F - 107,6 °F) bei 18 °C – 28 °C (64,4 °F - 82,4 °F) Umgebungstemperatur +0,2 °C für restliche Mess- und Umgebungstemperaturbereiche
Betriebsbedingungen	5 °C (41 °F) bis 40 °C (104 °F), bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15% bis 95%, Umgebungsdruck: 700–1.060 hPa
Aufbewahrungs- und Transportbedingungen	-20 °C (-4 °F) bis 55 °C (131 °F), bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15% bis 95%
Gewicht	ca. 13,3 g (mit Batterie)
Abmessungen (BxTxH)	141 x 23 x 13 mm
IP Klasse	IP 27
Erwartete Lebensdauer	Information zur Lebensdauer des Produkts finden Sie auf der Homepage.

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerät oder im Batteriefach.

Dieses Gerät entspricht den jeweiligen nationalen Bestimmungen und der europäischen Norm EN 60601-1-2 (Gruppe 1, Klasse B, Übereinstimmung mit CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-39, IEC 61000-4-39) und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikations Einrichtungen dieses Gerät beeinflussen können.

GARANTIE/SERVICE

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Hinweis zur Meldung von Vorfällen

Für Hersteller / Patient in der Europäischen Union und Identischen Regulierungssystemen gilt: Sollte sich während oder aufgrund der Anwendung des Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie der jeweiligen nationalen Behörde des Mitgliedsstaates, in welchem sich der Anwender/ Patient befindet.

ENGLISH
Read the instructions for use carefully and keep them for later use. Make them accessible to other users and note the information they contain. INCLUDED IN DELIVERY Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address. • Thermometer • Protective cap • Instructions for use • 1 x 1.5 V LR 41 battery The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device: ⚠️ WARNING Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, there is a risk of death or serious injury. ⚡ CAUTION Indicates a potentially imminent hazard. If it is not avoided, slight or minor injuries may result. NOTICE Indicates a potentially harmful situation. If it is not avoided, the device or something in its vicinity may be damaged. Product information Note on important information Observe the instructions Read the instructions before starting work and/or operating devices or machines The electronic device must not be disposed of with household waste Batteries must not be disposed of with household waste Manufacturer Date of manufacture CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives. Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material code 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations. Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger, and against the effects of temporary immersion in water Direct current UDI Unique device identifier (UDI) Identifier for unique product identification REF Item number SN Serial number MD Medical device # Type number Type BF applied part Temperature limit Humidity limitation Importer Protect from sunlight and heat Swiss authorised representative

⚠️ WARNING

Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, there is a risk of death or serious injury.

⚡ CAUTION

Indicates a potentially imminent hazard. If it is not avoided, slight or minor injuries may result.

NOTICE

Indicates a potentially harmful situation. If it is not avoided, the device or something in its vicinity may be damaged.

Product information Note on important information
Observe the instructions Read the instructions before starting work and/or operating devices or machines
The electronic device must not be disposed of with household waste
Batteries must not be disposed of with household waste
Manufacturer
Date of manufacture
CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material code 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard
Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger, and against the effects of temporary immersion in water
Direct current
UDI Unique device identifier (UDI) Identifier for unique product identification
REF Item number
SN Serial number
MD Medical device
Type number
Type BF applied part
Temperature limit
Humidity limitation
Importer
Protect from sunlight and heat
Swiss authorised representative

CE labelling

This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.

Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material code
1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard

Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.

Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger, and against the effects of temporary immersion in water

Direct current

Unique device identifier (UDI)
Identifier for unique product identification

Item number

Serial number

Medical device

Type number

Type BF applied part

Temperature limit

Humidity limitation

Importer

Protect from sunlight and heat

Swiss authorised representative

Geschützt gegen feste Fremdkörper, 12,5 mm Durchmesser und größer und gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser
Gleichstrom
Unique Device Identifier (UDI) Kennung zur eindeutigen Produktidentifikation
Artikelnummer
Seriennummer
Medizinprodukt
Typenummer
Anwendungsteile Typ BF
Temperaturbereich
Feuchtigkeitbereich
Importeur
Schweizer Bevollmächtigter

INTENDED PURPOSE

Intended use

The thermometer is intended exclusively for the orally, rectally or axillary measurement of human body. The thermometer is only intended for private use in a domestic environment and not for commercial use.

Intended users

The thermometer is intended for use in the home healthcare environment, not in professional healthcare facilities. The thermometer can be used on newborns weighing 2.5 kg and above, as well as on infants, toddlers and children under supervision; it can be used for self-treatment by anyone over 12 years of age.

Clinical benefits

The recorded measurements can support in diagnoses and treatments.

Indication

An elevated body temperature is suspected. The user can quickly and easily measure the human body temperature in the anus, oral cavity or armpit with the thermometer and thus determine whether the person concerned has a fever.

Contraindication

