


beurer

MG 55



RO Tapotament
Instrucțiuni de utilizare

CE

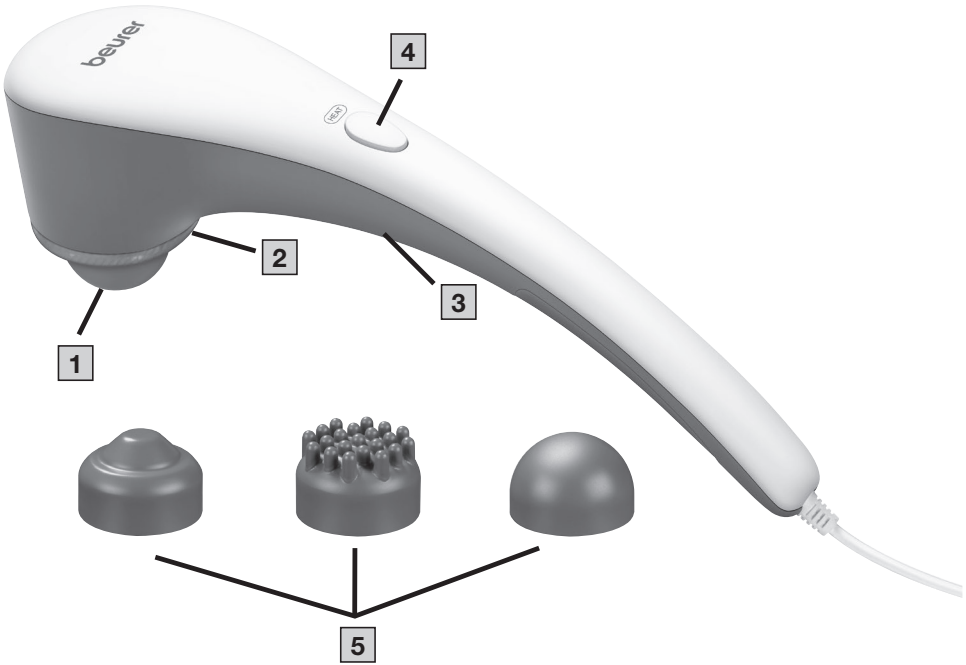



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea aparatului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

CONȚINUT

1. Pachet de livrare.....	4	7. Întreținere și depozitare	6
2. Explicația simbolurilor	4	8. Ce fac în cazul în care apar probleme?	6
3. Utilizare conform destinației.....	5	9. Eliminarea ca deșeu	6
4. Indicații de avertizare și de siguranță.....	5	10. Garanție/Service.....	7
5. Descrierea aparatului.....	6		
6. Utilizare.....	6		
6.1 Punerea în funcțiune	6		

⚠ AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Suprafața aparatului este fierbinte. Persoanele care sunt insensibile la căldură trebuie să fie atente la utilizarea aparatului.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 x Tapotament
- 3 x Elemente de masaj interschimbabile
- 1 x Prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:

⚠ PERICOL

Indică un pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința este decesul ori vătămări foarte grave.

⚠ AVERTIZARE













Denumeste un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi decesul ori vătămări foarte grave.

⚠️ ATENȚIE

Denumeste un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi vătămări ușoare ori minore.

INDICAȚIE

Denumeste o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitat, dispozitivul sau obiectele din jur pot fi deteriorate.

	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție, încadrându-se prin urmare în clasa de protecție 2.
	Citiți instrucțiunile de utilizare.
	A se utiliza exclusiv în spații închise.
	Separati componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
	Producător
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
	marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Simbolul Importator

3. UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI

Acest aparat este conceput pentru masarea părților individuale ale corpului uman. Nu poate înlocui însă tratamentul medical. Nu utilizați aparatul pentru masaj dacă vă regăsiți în una dintre situațiile prezentate în următoarele indicații de avertizare. În cazul în care nu sunteți sigur dacă aparatul de masaj este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul.

⚠️ AVERTIZARE

Nu utilizați aparatul de masaj

- pentru animale,

- în cazul unui prolaps al nucleului pulpos sau al modificărilor patologice ale vertebrelor,
- pentru masaje în zona cardiacă în cazul în care beneficiați de un stimulator cardiac și consultați-vă medicul înainte de utilizarea aparatului și în alte regiuni ale corpului,
- în zone de piele și de corp umflate, arse, iritate sau rănite,
- în timpul sarcinii,
- pe față (ochi), pe laringe sau alte zone foarte sensibile ale corpului,
- în timpul somnului,
- după consumarea de medicamente sau alcool (capacitate redusă de percepție!).

Înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să vă consultați medicul

- dacă suferiți de o afecțiune gravă sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală,
- în cazul răcelii însoțite de febră, varicelilor, trombozei, tromboflebitelor, icterului, diabetului, problemelor sistemului nervos (de exemplu sciatică) sau inflamațiilor acute.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

⚠️ AVERTIZARE

Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare

⚠️ AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest aparat de masaj se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai la tensiunea de rețea menționată pe aparat,
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni cu trăsnete.

În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul de alimentare. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde. Nu dezambalati aparatul, indiferent de situație. În situația în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia de către producător sau de un centru autorizat de relații cu clienții.

Asigurați-vă că aparatul de masaj, ștecărul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai în spații interioare uscate,
- doar dacă aveți mâinile uscate,
- niciodată în cadă, sub duș sau lângă chiuvete pline cu apă,
- niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
- niciodată în aer liber.

Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.

Reparații

⚠️ AVERTIZARE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparații efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat..

Pericol de incendiu

⚠️ AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate duce în anumite condiții la incendii!

Din acest motiv, nu utilizați aparatul de masaj

- mai mult de 15 minute (pericol de supraîncălzire); lăsați aparatul să se răcească timp de minimum 15 minute înainte de următoarea utilizare,
- nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă, ...

Manipulare

⚠️ ATENȚIE

Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Aveți grijă să nu se prindă fire de păr în aparat.
- Evitați contactul cu obiecte ascuțite sau tăioase.
- Nu îndoiți cablul.
- Protejați aparatul împotriva surselor de căldură prea apropiate, cum ar fi aragazuri, radiatoare sau lumină solară directă.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- | | |
|--|---|
| 1 Cap de masaj | 2 Funcția de încălzire |
| 3 Buton Pornit/Oprit Regulator (intensitate de masaj reglabilă fără trepte) | 4 Tastă Încălzire Funcția de încălzire |
| 5 Accesorii de masaj interschimbabile | |

6. UTILIZARE

Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a cupla cablul de alimentare. Porniți aparatul rotind regulatorul în sensul acelor de ceasornic dincolo de punctul de blocare.

Puteți activa în paralel **Funcția de încălzire** apăsând tasta „Heat”. Schimbați accesoriile de masaj rotind accesoriul aflat pe produs în sens contrar acelor de ceasornic și înlocuindu-l. Fixați noul accesoriu de masaj aplicat rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Conduceți aparatul cu una sau cu ambele mâini în regiunea corpului care urmează a fi masată. Puteți sta în picioare, așezat sau culcat și vă puteți masa pe dumneavoastră sau puteți masa o altă persoană. Apăsând mai puternic sau mai puțin puternic aparatul de masaj puteți modifica intensitatea de masaj. Nu masați o anumită regiune a corpului mai mult de 3 minute; treceți după această perioadă la altă regiune a corpului.

6.1 Punerea în funcțiune

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, ștecărul și cablul cu privire la deteriorări.

- Racordați aparatul la rețeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

INDICAȚIE

Nu folosiți aparatul cu scurt timp înainte de a merge la culcare. Masajul poate avea efect stimulant și poate provoca tulburări ale somnului.

⚠️ AVERTIZARE

- Masajul trebuie resimțit întotdeauna ca plăcut și relaxant.
- Întrerupeți masajul sau schimbați poziția aparatului de masaj dacă masajul vă provoacă dureri sau o senzație de disconfort.
- Nu introduceți și nu prindeți părți ale corpului, în special degete, în zona capului de masaj.

7. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Curățare

Ștergeți aparatul scos din priză și răcit doar cu o cârpă ușor umezită. Puteți utiliza un detergent blând.

⚠️ AVERTIZARE

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul doar conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Utilizați din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.

Depozitare

Păstrați aparatul de masaj într-un loc uscat și răcoros, care nu se află la îndemâna copiilor. Vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original.

8. CE FAC ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Cauză	Remediere
Capul de masaj nu se mișcă.	Aparatul nu este cuplat la rețeaua electrică.	Cuplați ștecărul și porniți aparatul.
	Aparatul nu este pornit.	Porniți aparatul.
	Protecția împotriva supraîncălzirii s-a declanșat.	Decuplați aparatul de la rețeaua de energie electrică, așteptați cel puțin 15 minute, cuplați-l din nou la rețeaua electrică și porniți-l.

9. ELIMINAREA CA DEȘEU

⚠️ AVERTIZARE

Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exem-



plu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.

DATE TEHNICE

Alimentare	220-240 V~; 50/60 Hz; 20 W
Dimensiuni	ca. 43,5 x 9,5 x 9,5 cm
Greutate	ca. 1000 g

10. GARANȚIE/SERVICE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

