

# beurer

RO



HK Comfort

## RO Pernă electrică Instrucțiuni de utilizare



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany  
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255  
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

CE

## Explicații simboluri de pe etichetă



Citiți instrucțiunile!



A nu se utiliza împăturită sau mototolită!



A nu se perfora cu ace!



Materialele utilizate pentru acest aparat îndeplinesc cerințele umano-ecologice ridicate ale standardului Öko-Tex 100, care este aprobat de Institutul de Cercetare din Hohenstein.

**Stimată clientă, stimate client,**

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră de sortimente. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit din domeniul căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj și aer.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru utilizarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație

A dumneavoastră, Echipa Beurer

**Conținut de livrare:** 1 pernă electrică, 1 comutator, aceste instrucțiuni de utilizare

# 1. Instrucțiuni importante de siguranță - citiți cu atenție și păstrați-le pentru utilizarea ulterioară

Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate conduce la daune materiale sau vătămări corporale (electrocutare, arsuri ale pielii, incendiu). Următoarele instrucțiuni de siguranță și pericol servesc nu numai pentru protejarea sănătății dumneavoastră, respectiv a sănătății terților, ci și pentru protejarea produsului. Din acest motiv, vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni de siguranță și să înmănați acest manual o dată cu înstrăinarea articolului.

- Utilizați această pernă electrică numai în scopul descris în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Această pernă electrică nu este destinată utilizării în spitale.
- Această pernă electrică nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu dețin experiență și/sau cunoștințe suficiente, cu excepția cazului în care sunt monitorizate de o persoană competentă responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu o utilizați pentru persoane lipsite de ajutor, copii mici sau persoane insensibile la căldură (de ex. diabetici, persoane cu modificări ale pielii datorate bolii sau porțiuni de piele cicatrizate în zona de aplicare, după consumarea de medicamente analgezice sau alcool).
- Utilizarea prelungită poate conduce la arsuri ale pielii.
- Atenție! În niciun caz nu adormiți atât timp cât perna electrică este în funcțiune.
- Nu folosiți perna electrică la nivelul părților corpului care sunt inflamate, rănite sau umflate. Pentru nelămuriri, consultați medicul înainte de utilizare.
- Câmpurile electrice și magnetice ce provin de la această pernă electrică pot perturba funcționarea pacemaker-ului dumneavoastră. Acestea se află totuși mult sub valorile limită: intensitate a câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitate a câmpului magnetic: max. 80 A/m, densitate a câmpului magnetic: max. 0,1 Mili-Tesla. Din acest motiv vă rugăm să consultați medicul și producătorul pacemaker-ului dumneavoastră înainte de utilizarea acestei perne electrice.

- Această pernă electrică
  - racordați-l numai la tensiunea indicată pe aparat;
  - trebuie utilizată numai cu tipul de comutatoare indicat pe pernă electrică,
  - nu-l lăsați să funcționeze nesupravegheat,
  - nu îl porniți dacă este pliat sau mototolit,
  - nu-l strângeți,
  - nu îl îndoiți prea tare,
  - nu îl folosiți pe animale,
  - nu îl utilizați în stare umedă.
- Piesele electronice din comutatorul pernei electrice produc o ușoară încălzire a acestuia în timpul funcționării. Din acest motiv comutatorul nu trebuie să fie acoperit sau să se afle pe pernă electrică în timpul funcționării.
- Nu trageți de cabluri, nu le rotiți sau îndoiți prea tare.
- Nu introduceți ace sau obiecte ascuțite în această pernă electrică.
- Această pernă electrică nu poate fi utilizată de copii, cu excepția cazului în care comutatorul a fost presetat de către un adult sau de către un supraveghetor sau copilul a fost suficient instruit cu privire la utilizarea în siguranță a pernei electrice.
- Copiii trebuie să fie atent supravegheați pentru a nu li se permite să se joace cu această pernă electrică.
- Această pernă electrică trebuie verificată periodic în privința semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne sau dacă această pernă electrică a fost utilizată în mod necorespunzător, aceasta trebuie dusă la producător sau la comerciant înainte de următoarea utilizare.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestei perne electrice este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a evita riscurile.
- Reparațiile vor fi efectuate numai de către persoane de specialitate sau la un punct de reparație autorizat de producător, fiind nevoie de unelte speciale. Din cauza reparațiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave.
- Dacă mai aveți întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresați-vă Serviciului Clienți.

## 2. Utilizarea corespunzătoare

Această pernă electrică este destinată încălzirii corpului uman. Astfel, puteți beneficia de căldură în mod raționalizat. Căldura stimulează circulația și relaxează musculatura. Această pernă electrică nu este destinată utilizării în spitale sau în scopuri comerciale. În special nu trebuie încălziți sugarii, copiii mici, persoanele insensibile la căldură sau cele lipsite de ajutor și nici animalele. Pernele noastre electrice din microfleece cu proprietate de respirație activă au un grad ridicat de adaptabilitate și sunt plăcute la atingere. Datorită comutatorului detașabil, curățarea pernei electrice se poate realiza și cu ajutorul mașinii de spălat (a se vedea instrucțiunile de curățare). La prima folosire, pernă electrică poate dezvolta un miros de material sintetic, care însă se pierde după scurt timp.

## 3. Operarea

### 3.1 Siguranța

Această pernă electrică este dotată cu un SISTEM DE SIGURANȚĂ. Această tehnică electronică senzorială împiedică o supraîncălzire a pernei electrice pe întreaga sa suprafață prin deconectare automată în caz de eroare. Dacă se produce o deconectare automată în caz de

eroare, prin intermediul sistemului de siguranță lampa de semnalizare nu se mai aprinde chiar și în stare pornită a pernei electrice. Vă rugăm să vă asigurați, din motive de siguranță, că perna electrică nu mai poate fi pornită în caz de eroare, fiind necesară trimiterea acesteia la adresa de service.

### 3.2 Punerea în funcțiune

Verificați mai întâi dacă comutatorul este conectat prin cuplare la perna electrică. Apoi introduceți ștecherul de rețea în priză.

### 3.3 Selectarea temperaturii

Perna electrică se încălzește cel mai repede atunci când setați mai întâi cea mai ridicată treaptă de temperatură. Această treaptă poate fi modificată ulterior, dacă este cazul.

După pornirea pernei electrice, treapta de comutare luminează intermitent pentru o perioadă scurtă – timp în care perna electrică realizează o autotestare. Apoi treapta de comutare rămâne aprinsă.

În cazul unei utilizări de durată mai îndelungată, vă recomandăm cea mai mică treaptă de temperatură a pernei electrice.

### 3.4 Trepte de temperatură

Treapta: 0 oprit  
1 căldură minimă  
2 căldură medie  
3 căldură maximă

### 3.5 Decuplarea automată

Aceste perne electrice sunt dotate cu un sistem de decuplare automată. Acesta oprește alimentarea cu căldură la circa 90 de minute după punerea în funcțiune a pernei electrice. Afișajul de funcții începe apoi să lumineze intermitent. Pentru a putea pune din nou perna electrică în funcțiune, trebuie mai întâi să poziționați comutatorul pe poziția „0”. După circa 5 secunde perna electrică poate fi din nou pornită. În cazul în care perna electrică nu mai este utilizată după decuplarea temporară, aceasta trebuie oprită (treapta „0”) sau este necesară scoaterea ștecherului de rețea din priză.



### 3.6 Încălzirea rapidă

Această pernă electrică posedă o opțiune de încălzire rapidă, care determină încălzirea rapidă în primele 10 minute.



## 4. Curățare și îngrijire


### Scoateți de fiecare dată ștecherul de rețea din priză înainte de curățarea pernei electrice.

Petele mai mici de pe perna electrică pot fi îndepărtate cu o cârpă sau un burete umed și eventual cu o soluție lichidă delicată. Nu utilizați detergenți care conțin solvenți.

Rețineți că perna electrică nu trebuie curățată chimic, stoarsă, uscată în uscător, centrifugată sau călcată cu fierul.

Înainte de spălare, separați cuplarea și, prin urmare, comutatorul de perna electrică. Setează mașina de spălat pe spălare delicată la 30°C.

Din motive ecologice, vă recomandăm spălarea pernei electrice numai împreună cu alte materiale textile. Utilizați o soluție lichidă delicată și aplicați-o conform indicațiilor producătorului.

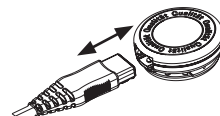

Vă rugăm aveți grijă ca perna electrică să nu fie spălată prea des. Din acest motiv, perna electrică se va spăla în mașina de spălat de maxim 10 ori pe întreaga durată de viață.

**Nu fixați perna electrică pentru uscare cu cârlige de rufe sau alte obiecte de acest fel și nu o porniți în timp ce se usucă!**

**Reconectați comutatorul la perna electrică abia după uscarea completă a conectorului și a pernei electrice.**

## 5. Păstrarea

Dacă nu utilizați perna electrică un timp mai îndelungat, vă recomandăm să o păstrați în ambalajul original într-un mediu uscat și fără să fie încărcat. În timpul depozitării, nu așezați obiecte pe perna electrică pentru a evita îndoirea acesteia.

Mai întâi lăsați perna electrică să se răcească.

## 6. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.





